

POTTSTOL - DUSCHSTOL - TOAFÖRHÖJNING

Art. 302013

Bruksanvisning



Toilet chair with
toilet bucket



Toilet chair is equipped with
easily removable EVA
cushions on the seat and
backrest



Easy
height
adjustment



The toilet bucket easily fits into
the seat and can be removed by
pulling the bucket handle

1. Introduktion

Gratis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppgradera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

Toalettstol med toaletthink är en medicinteknisk produkt som endast är avsedd att användas som sittstöd för personer som behöver sådan hjälp vid toalettbesök, bad eller dusch (badrummet måste vara kompatibelt). Produkten fyller en grundläggande funktion och gör livet för både den fysiskt funktionshindrade användaren och assistenten mycket enklare. Produkten bör endast användas inomhus. All annan användning är förbjuden.

Indikationer

Produkten är avsedd för personer med funktionsbegränsningar, personer i rullstol och andra personer med begränsad rörlighet i ländryggen, knäna eller höfterna, samt för alla som har svårt att utföra daglig personlig hygien i stående ställning. All annan användning än den som anges ovan är förbjuden.

Kontraindikationer

Produkten är inte indicerad för patienter som inte kan upprätthålla korrekt kroppsbalans i sittande och stående position. Duschpallen får inte användas om användaren har nedsatt perception. Kontraindikationer kan inte relateras till en specifik klinisk bild, och de beror på individuell utvärdering av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av rätt ortopedteknisk produkt för ett visst tillstånd bör alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller fysioterapeut. Dessutom måste du följa säkerhetsinformationen i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten kan användas inom hemvård, vård- och långtidsvård samt på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

2. Säkerhetskrav

- Se till att alla personer som använder produkten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i ett felfri skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart sluta använda produkten och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte upp på produkten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på produkten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Produkten får inte belastas med mer vikt än vad som anges i Tekniska data.
- Produktet får endast användas på ett stabilt underlag.
- Var försiktig när du monterar eller justerar delar av produkten.
- Se till att alla ben är inställda på samma höjd.
- Använd produkten endast på en plan och slät yta med alla fyra benen stabilt placerade på ytan.
- Kontrollera alltid enhetens stabilitet före användning.
- Stå inte på enheten.
- Se till att varje monteringskruv är ordentligt låst innan du använder toalettstolen.
- Tryck inte hårda föremål mot sidorören, eftersom detta kan skada sidorören eller dynan.
- Håll händer eller fingrar borta från rörliga delar för att undvika skador.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda. Innehållet i paketet är:

- ✓ 1 Huvudram inkl. sits och stödben;
- ✓ 4 ben;
- ✓ 1 ryggstöd;
- ✓ 1 Toaletthink och lock;
- ✓ 2 Dynor, en för ryggstödet och en för sitsen;
- ✓ 1 Tvålkopp;
- ✓ 1 hållare för toalettpapper;
- ✓ 2 skruvar;
- ✓ 1 Bruksanvisning;

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Toalettstolen med toalettthink är avsedd för personer som behöver stöd vid toalettbesök eller duschning. Stolen är utrustad med lätt avtagbara EVA-dynor på sits och ryggstöd. Den har en aluminiumram med uppfällbara armstöd, höjjusterbara ben, en hink, ett lock och ett ryggstöd. Den levereras också med en tvålapp och en toalettappershållare för extra bekvämlighet.

Produkten består av följande delar:

1. Uppfällbart armstöd
2. Ryggstöd
3. Säte
4. Lock
5. Skopa
6. Höjjusterbart ben
7. Halkfri gummisko

Beskrivning av monteringen

För att montera toalettstolen måste du först placera huvudramen upp och ner och sätta in de 4 benen i ramen genom att trycka på låsstift på varje ben och skjuta in benen i de avsedda hålen tills låsstift sticker ut. Vänd stolen på benen och fäst ryggstödet genom att rikta in det mot ryggröret och dra åt de 2 medföljande skruvarna från baksidan. Sätt sedan i hinken och placera locket i sitsen. Fäst tvålapp och toalettappershållaren på stolens sidor genom att skjuta in dem i de avsedda spårerna. Slutligen fäster du EVA-sits- och ryggstödsdynan genom att trycka in dem i lämpliga hål.



*sittdynan är borttagen för utställning

Funktionsbeskrivning

Öppna/stänga armstöden

För att öppna armstöden trycker du på knappen på insidan av armstödsröret och drar samtidigt röret uppåt.

För att stänga och säkra armstöden håller du i armstödsröret och trycker ned det tills du hör ett "klick"-ljud. Se till att fäststiftet sticker in i hålet under armstödsknappen.

VARNING! Öppna eller stäng inte armstödet med för stor kraft för att undvika skador på delarna.

VARNING! För inte in händerna under armstödet när du stänger armstödet för att undvika att skada händerna.

Justering av toalettstolens höjd

För att justera toalettstolens höjd måste du justera längden på alla ben till önskad inställning. För att justera längden på ett enskilt ben trycker du på låsstift på insidan av benet och skjuter benet till önskad inställning och ser till att låsstift lossnar. Alla ben ska justeras till samma höjd.

VARNING! Justera inte höjden på toalettstolen när någon sitter på den och se alltid till att alla låsstift har hoppat ut.


OBS: Sitthöjden är korrekt inställd när brukaren sitter på toalettstolen och båda fötterna helt nuddar marken.

Tillbehör

Det finns inga tillbehör till den här enheten.

4. Tekniska data

Toilet chair with toilet bucket	Art. 302013
Total storlek (L x B x H)	51,6 - 58,7 x 64,5 - 67,5 x 72 - 92 cm
Bredd mellan armstöden	44 cm
Höjd	72 - 92 cm
Justeringsområde för sitthöjd	44,5 - 64,5 cm
Produktens vikt	7 kg
Max. användarvikt	150 kg

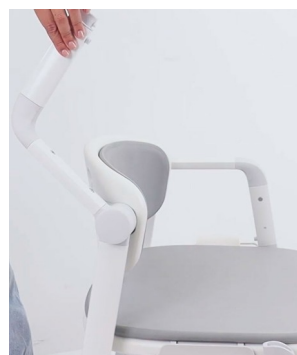

Armstöd i öppet läge

Produktetikett



Exempel på produktetikett

	QR-kod till webbplatsen		CE-märkt produkt
	Producent		Produktionsdato
	Se bruksanvisningen		Max belastning
	Serienr.		Medicinsk utrustning
	Varenr		Endast för inomhusbruk
	Max bredde		

Betydelsen av ikonerna

5. Underhåll och skötsel

Vanlig smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring. Hela produkten kan desinficeras med ett kommersiellt tillgängligt desinfektionsmedel. Följ alltid desinfektionsmedlets tillverkares anvisningar för användning och säkerhet vid desinfektion.

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- ✓ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✓ Kontroll av att ramen inte är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✓ Kontroll av slitdelar och byte av dem vid behov.
- ✓ Allmän åtdragning av komponenterna.

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att demontera stolen för transport. Stolen ska transporteras på ett stabiliserat och säkrat sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över apparaten ska apparaten kontrolleras tekniskt och desinficeras enligt punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Toalettstol är inte stabil	Benen kan justeras till olika höjder	Justera alla ben till samma höjd

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas in till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garantier

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid oavsiktlig reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.

9. CE-försäkringen

Produkten har genomgått bedömningen av överensstämmelse i enlighet med EU:s förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkringen om överensstämmelse har utfärdats för enheten och finns tillgänglig på:

mobilex.dk/medias/2025-03/ce_302013_18646.pdf

eller via QR-koden till höger.

