

BRUKSANVISNING



Dyna för tryckavlastning

Modeller: BUBBLE BASIC, BUBBLE
EVERYDAY, BUBBLE EXPERT

1. Inledning

Kontrollera produkten med avseende på eventuella transportskador innan du använder utrustningen. Om så skulle vara fallet så kontakta försäljningsstället.

Läs sedan igenom denna bruksanvisning som innehåller viktig information för användaren.

Kontakta oss om du har några frågor som rör användningen av utrustningen. Vår personal ger dig nödvändig information direkt.

Samtidigt vill vi påpeka att du ska kontakta din läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut om du har några andra frågor som inte rör användningen av våra produkter.

2. Utförande

Modeller BUBBLE EVERYDAY, BUBBLE EXPERT

Madrassen är tillverkad av högkvalitativ plast. Systemet med kamrar som är sammankopplade i ett enda luftsystem ger kroppen rätt balans. Trycket på en kammare skapar ett ökat tryck i de intilliggande kamrarna, vilket gör det möjligt att avlasta enskilda kroppsdelar. Konstruktionen med flera kamrar och möjligheten att ändra hårdheten genom att pumpa upp eller släppa ut luft säkerställer hög användningskomfort.

BUBBLE EXPERT modellen är dessutom utrustad med en automatisk ventil som gör att dynans hårdhet kan ändras när som helst beroende på användarens önskemål, och BUBBLE EVERYDAY modellen är utrustad med en effektiv handpump. Tack vare värmesvetsningsteknik är dynan hållbar och läcker inte luft.

Dynan är utrustad med ett överdrag med dragkedja som är tillverkat av nätmaterial med halkskyddad undersida. Praktiskt handtag gör det enkelt att bära med sig. Överdraget har ytterligare kardborreband som gör det lättare att fästa dynan vid behov.

Modeller BUBBLE BASIC

Dynans bekväma form och möjligheten att justera dess hårdhet genom att pumpa upp eller släppa ut luft säkerställer hög användningskomfort. Effektiv pump medföljer. Vattentätt och tvättbart medicinskt nylontyg säkerställer hög utförandekvalitet. Tack vare värmesvetsningsteknik är dynan hållbar och läcker inte luft. Dold luftventil förhindrar oavsiktligt luftutsläpp och ökar användningskomforten.

Satsen innehåller:

- dyna,
- överdrag (modeller BUBBLE EVERYDAY och BUBBLE EXPERT),
- kardborreband (modeller BUBBLE EVERYDAY och BUBBLE EXPERT),
- handpump (modeller BUBBLE BASIC och BUBBLE EVERYDAY).

3. Avsedd användning och anvisningar

Pneumatisk dyna för tryckavlastning tillhör hjälpmedel som är avsedda för personer som riskerar att få trycksår. Dynan ska användas hos personer som långvarigt befinner sig i sittande ställning och lider av störningar i blodflödet i perifera cirkulationssystemet. Den ska användas för att förebygga trycksår och vid behandling av trycksår upp till grad 1 (enligt NPUAP / EPUAP).

Använd inte mot naken kropp. Rådfråga läkare, sjukgymnast eller fysioterapeut före användning.

4. Användning

1. Ta ut dynan ur förpackningen.
2. Vik ut dynan till rätt form.
3. Öppna luftventilen och sätt in pumpen (modeller BUBBLE BASIC och BUBBLE EVERYDAY) eller vrid ventilen till vänster - dynan blåses upp automatiskt (modell BUBBLE EXPERT).
4. Blås upp till önskad hårdhet.
5. Sätt på överdraget (modeller BUBBLE EVERYDAY och BUBBLE EXPERT).

5. Efter avslutad användning

Gör så här för att tömma ut luft:

- i modellerna BUBBLE BASIC och BUBBLE EVERYDAY – öppna luftventilen och kläm den med pekfingret och tummen,
- i modellen BUBBLE EXPERT - vrid ventilen till vänster, sitt på dynan och lämna ventilen i öppet läge.

6. Tekniska specifikationer

- Dynans mått:
BUBBLE BASIC – 43 x 43 x 6 cm
BUBBLE EVERYDAY – 42 x 42 x 4 cm
BUBBLE EXPERT – 46 x 38 x 4 cm
(+/-10 mm efter uppblåsning)
- Max belastning: upp till 120 kg
- Dynans vikt:
BUBBLE BASIC – 0,13 kg
BUBBLE EVERYDAY – 0,65 kg
BUBBLE EXPERT – 0,65 kg

7. Anmärkningar och anvisningar

- Blås bara upp dynan med den medföljande pumpen (modeller BUBBLE BASIC och BUBBLE EVERYDAY) och var försiktig så att du inte skadar luftventilen vid uppblåsning.
- Pumpa inte med en mekanisk kompressor. Överdrivet tryck kan göra att dynan spricker.
- Modellen BUBBLE EXPERT har en automatisk ventil och därför ska du inte använda pumpar (dynan blåses upp automatiskt).
- Överskrid inte dynans maximala belastning.
- Hoppa inte på dynan.
- Stå inte på dynan eftersom det kan orsaka personskada.
- Blås inte upp dynan under användning.
- Använd endast för avsedda ändamål.
- Innan du använder dynan på ljusa klädselmateriel ska du göra ett test, eftersom det finns risk för att punkterna på överdragets halkskyddade undersida färgar av sig.

- Förvaras torrt, borta från öppen eld och vassa föremål.
- Utsätt dynan inte för höga temperaturer och solljus, eftersom en temperaturökning inuti kudden kan orsaka att den spricker.

8. Underhåll och rengöring av dynan:

- Dynan ska rengöras med en fuktig trasa med milda rengöringsmedel som har certifierats av det polska hygieninstitutet (PZH) så att dynan inte blir blöt och torkas efter varje underhåll. Användning av starka tvättmedel eller rengöringsmedel kan skada produkten. Använd inga slipmedel.
- **Obs!** Innan rengöringen påbörjas, stäng pumpventilen för att förhindra att den blir blöt.
- **Obs!** Använd inga värmekällor i torkningsprocessen.
- **Obs!** Använd inga blekmedel, sköljmedel eller kemtvättmedel vid rengöring!

Rengöra överdraget:

- Överdraget kan tvättas för hand eller i tvättmaskin vid 40 ° C med milda tvättmedel. Stäng dragkedjan på överdraget innan rengöringen påbörjas. Överdraget kan torkas med en varm luftström eller i torktumlare vid låg temperatur.
- **Obs!** Överdraget ska läggas på dynan när det är helt torrt.
- **Obs!** Överdraget ska inte strykas!

Desinfektion:

- Desinficera dynan med en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.

9. Garantiuppgifter

Alla produkter som vårt företag distribuerar omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som du fick vid köpet. Samtidigt vill vi påpeka att inköpsbeviset (kvitto eller faktura) ska bevaras för att kunna åberopa garantin.

Som ett användarvänligt företag levererar vi endast produkter som har testats när det gäller material, kvalitet och funktionalitet.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor om serviceförfarandet.

TACK FÖR ATT DU VALDE TIMAGO !

10. Märkningar

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs		Läs bruksanvisningen
	Tillverkaren har bedömt överensstämmelse med de väsentliga kraven som gäller för medicintekniska produkter.		