

SAVANAH BADBRÄDA



Bruksanvisning

Badbrädan är tillverkad i plastöverdragna aluminiumribbor. Badbrädan kan kompletteras med ett stödhandtag för placering på valfri sida. Badbrädan placeras mellann badkarets kanter. Savannah kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel. Den kan även decificeras. Max brukarvikt 190 kg.

När Du öppnat förpackningen sätter Du ihop de två fästdelarna på badbrädans undersida med de vingmuttrar som medföljer. Tillse att fästena ligger tätt emot badkarskantens insida.

AA1091A	Längd	66 cm	Bredd	23 cm
AA1091D	Längd	69 cm	Bredd	23 cm
AA1091B	Längd	71 cm	Bredd	23 cm
AA1091C	Längd	76 cm	Bredd	23 cm
AA1092	Stödhandtag			



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.