

## 1. Utförande

Toalettstolen har en pulverlackerad stålram. Modell **TGR-R KT 023B** har höjdjusterbara ben med gummiskydd, medan modell **TGR-R KT 023C** har ben med hjul, och bakhjulen är försedda med broms. Stolen är hopfällbar och utrustad med en toaletsits med lock och en toaletthink i plast med lock som enkelt kan tas bort. Enkel hopfällning och justering gör att den kan anpassas efter patientens behov, medan armstöden på sidorna bidrar till stabilitet och säkerhet vid användning.

### Toalettstolens delar:

- A.** armstöd
- B.** toaletsits
- C.** toaletthink
- D.** höjdjustering
- E.** halkskydd
- F.** hjul (bakhjul med broms)



## 2. Användning

Toalettstolen är ett hjälpmedel för att underlätta toalettbesök för användaren. Den rekommenderas för personer med problem med självständig förflyttning, för personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet samt för personer som inte kan sätta sig och resa sig upp själva. Stolen kan fungera som toalett tack vare toaletthinken under sitsen. Den underlättar toalettbesök och hygien. Tack vare transporthjulen kan toalettstolen bekvämt köras över en vanlig toalett när hinken tas bort.

### 3. Montering

#### Uppfällning och ihopfällning av toalettstolen

- Placera stolen på marken. Ta tag i plasthandtagen och fäll upp stolen, montera sedan den främre delen av ramen.
- Montera toalettsitsen och locket på baksidan av ramen och placera toaletthinken i mitten av ramen.
- För att fälla ihop stolen, ta bort toalettsitsen och locket, ta sedan bort toaletthinken, dra framsidan av ramen nedåt och dra sedan den ena sidan framåt och den andra bakåt.

#### Höjdjustering

För att justera benen, tryck in metallstiftet på benet, välj önskad höjd på innerröret och lås sedan rören på plats. Benen kan justeras i steg om 2,5 cm. **Observera!** Stiften i alla ben måste sitta på samma nivå. Stolens alla ben måste alltid stå stadigt på marken.

#### Användning

**Observera!** Bromsarna måste alltid låsas när användaren tar sig i eller ur rullstolen, ändrar position samt när stolen stannas. (**gäller för modell TGR-R KT 023C**). Öppna toalettlocket och ta sedan bort hinklocket. Täck hinken med locket efter användning och stäng därefter toalettlocket.

### 4. Teknisk specifikation

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Totalbredd                          | 56 cm         |
| Inre bredd                          | 46 cm         |
| Totaldjup                           | 47 cm         |
| Sitthöjd från marken TGR-R KT 023B  | 41-51 cm      |
| Sitthöjd från marken TGR-R KT 023C  | 43-53 cm      |
| Totalhöjd från marken TGR-R KT 023B | 71-81 cm      |
| Totalhöjd från marken TGR-R KT 023C | 73-83 cm      |
| Sättesdimensioner                   | 38 cm x 40 cm |
| Vikt TGR-R KT 023B                  | 6,5 kg        |
| Vikt TGR-R KT 023C                  | 8,0 kg        |
| Maxkapacitet                        | 120 kg        |
| Ramens färg                         | grå           |

## 5. Anmärkningar och rekommendationer

Timago International Group ska inte hållas ansvarigt för olämplig användning av produkten, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter eller användning för annat ändamål än det avsedda.

## 6. Underhåll

Kontrollera själv systematiskt toalettstolens skick: toalettstolen ska rengöras regelbundet med enbart vatten och milda rengöringsmedel. Torka noggrant.

**Använd inte** slipande polermedel, starka rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel för rengöring. Töm hinken och desinficera hinken och toaletsitsen efter varje användning. Använd toalettrenigöringsmedel enligt tillverkarens anvisningar.

## 7. Lagrings- och transportförhållanden

Utsätt inte produkten för direkt solljus, vatten eller fukt.

## 8. Garantiinformation

Produkten omfattas av en garanti enligt villkoren i garantikortet. Spara inköpsbeviset (kvitto eller faktura) för garantiändamål.

## 9. Märkning

|                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Referensnummer                                                                                    |  | Tillverkare            |
|  | Serienummer                                                                                       |  | Tillverkningsdatum     |
|  | Serienummer                                                                                       |  | Medicinteknisk produkt |
|  | Observera                                                                                         |  | Läs bruksanvisningen   |
|  | Tillverkaren har bedömt överensstämmelsen med de väsentliga kraven för medicintekniska produkter. |                                                                                     |                        |

Hela sortimentet hittar du hos våra återförsäljare. Läs mer på **[www.euforia.se](http://www.euforia.se)**  
Tack för att du valt Euforia AB och Timago!