



MONTERINGSANVISNING

Ta ut alla delar ur förpackningen:
1) U rör No.1 x 1
2) U rör No.2 x 1
3) Support rör x 2
4) Höjdjusterbart rör x 2
5) E-klämma x 2



Kontrollera alla delar noggrant för sprickor/brott före användning.

1.


Använd inte vaggan som säkerhetsräcke för sängen.
2.

Se till att alla tryckknappar är utfällda, att alla E-klämmor är monterade och att hela produkten är helt monterad innan användning.


SKÖTSELINSTRUKTIONER

Använd en mjuk trasa som inte är sammetsren och med vatten för att torka bort smutsen på ytan. Medicinsk alkohol kan användas vid behov. Använd inte tvättmedel för att rengöra produkten.


STEG 1
Montera stödrören på U-rör nr 2 (se figur A) och se till att alla knappar sticker ut ordentligt.

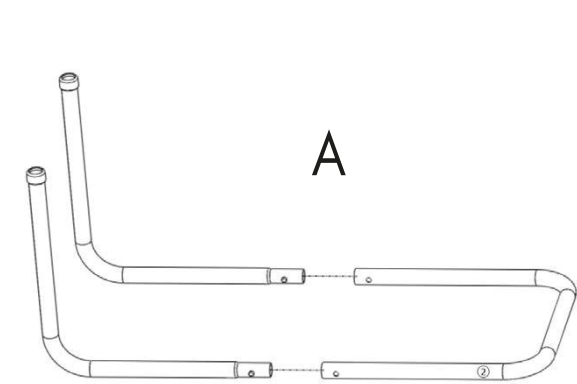

STEG 2
Montera de höjdjusterbara rören i stödrören (se figur B). Använd de 2 E-klämmorna för att fixera höjden.

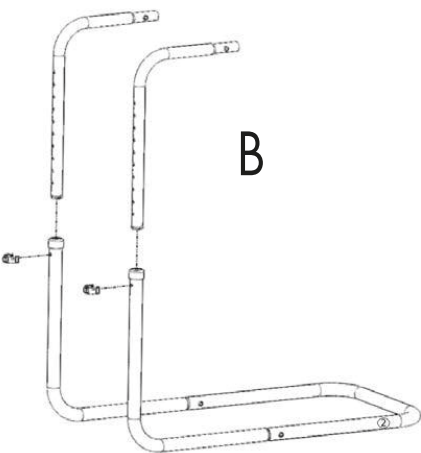

STEG 3
Montera U-rör nr 1 på de höjdjusterbara rören (se figur C). Sängvaggan är klar att användas.

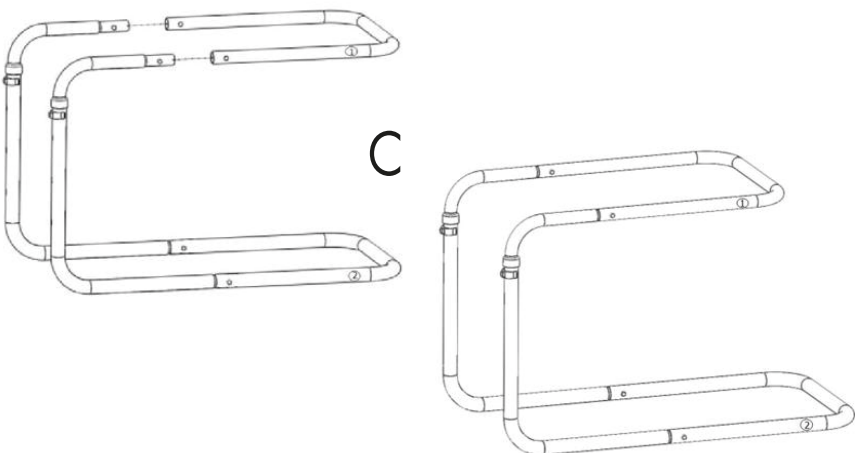

MAX BELASTNING 114 kg




Distributed by: Able2
Europe B.V.
Koperslagerij 15 4762
AR Zevenbergen The
Netherlands
www.able2.nl

Able2 UK Ltd.
www.able2.uk
Able2 Iberia S.L.
www.able2.es



Valentine International Ltd. Taiwan
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C

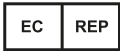

Y. Sung Handelsvertretung Duesselthaler
Str. 24
40211 Duesseldorf Germany