

EUFORIA

Hjälpmedel
& smarta ting

PR50305 Toalettram



ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

FOR **YOUR** SAFETY AND COMFORT

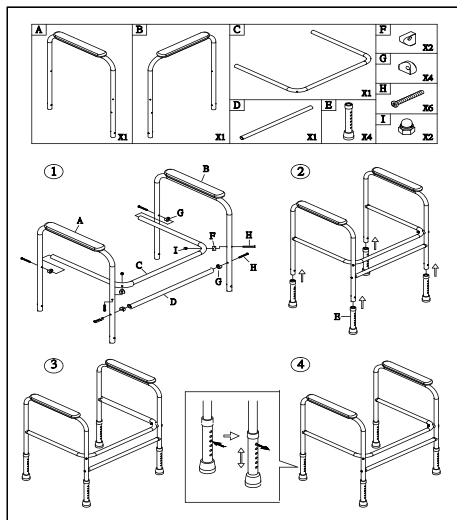
EUFORIA AB • Thulevägen 23 • 135 55 TYRESÖ
Tel 08-591 292 50, 070-752 02 28 • info@euforia.se • www.euforia.se

Instruktioner:

Kontrollera alla delar noggrant för sprickor/brott före användning.

Skötsel och underhåll:

Produkten bör rengöras regelbundet med ett mildt hushållsrengöringsmedel. Den kan desinficeras med ett vanligt desinfektionsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel, högtryckstvättar eller skursvampar.

**Användarinstruktioner:**

1. Se till att alla ben är justerade till samma höjd. Tryckknapparna måste vara helt sticka ut genom justeringshålet på varje benförlängning för att säkerställa en positivt lås.
2. Kontrollera att produkten är i perfekt skick före varje användning.
3. Överskrid inte den angivna maximala vikten för personer som använder enheten.
4. Kontrollera regelbundet produktens stabilitet och se till att skruvarna sitter ordentligt fast.
5. Produkten bör inte förvaras eller placeras utomhus.
6. Luta dig inte för långt framåt när du använder den och gör inga kraftiga, ryckiga rörelser.

FOR YOUR SAFETY AND COMFORT