


PR55005

Foten glider lätt på nylonfodret medan strumpan sitter på plats. Den flexibla plastkärnan i Strumppådragaren gör att personer enkelt kan forma rännan med bara en hand. Stora öglehandtag i änden av de starka, 81 cm långa remmarna är utmärkta för personer med svaga grepp.

Nylonfodret gör att foten lätt kan glida längs rännan. Frottéöverdraget håller strumpan eller strumpan säkert på plats på strumpbyxan.

BRUKSANVISNING

1. Dra ihop strumpan och dra den över änden av strumpstråget som saknar remmar.
Obs: För enhandsanvändning, rulla ihop strumpstödet och håll det mellan knäna. Skjut strumpan över änden av stödet.
2. Placera Easy-pull-strumpbyxan på golvet och håll i änden av remmarna.
Remmarna ska vara sträckta.
Obs: För enhandsanvändning, knyt ihop öglehandtagen för att bilda en stor ögla att hålla i.
3. För foten ner i rännan. Dra handen och remmen uppåt tills foten är helt inuti rännan.
4. Dra i handtagen tills strumpan är helt på och strumpstödet glider ut.

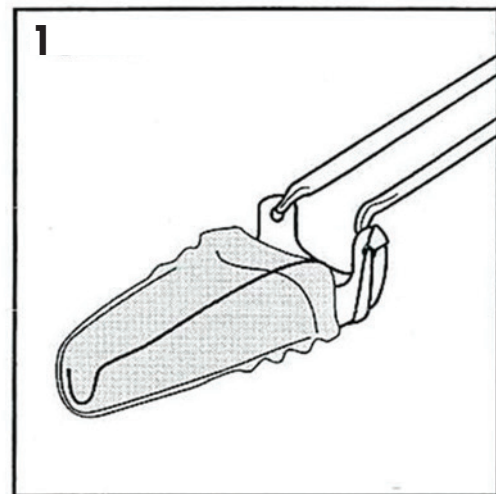

Rehaforum Medical GmbH
Daimlerstr. 12a
25337 Elmshorn
Germany

Distributed by:
Able2 Europe B.V.
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

Able2 UK Ltd.
www.able2.uk
Able2 Iberia S.L.
www.able2.es



MADE IN
CHINA