

HYGIENSTOL - DUSCHSTOL

Art. 305001, 305002

Bruksanvisning



Vit pulverlackerad ram

Standardmodell
med 4 låsbara
5" hjul



Avtagbara och
justerbara
fotstöd och
benstöd



Mjuk PU-sits och
ryggstöd



1. Introduktion

Gratis och tack för att du har valt en Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppgradera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

Användning är indicerad för personer med begränsad stående förmåga och nedsatt eller ingen funktionsförmåga i de nedre extremiteterna. Rullstolar för toalettstolen är en medicinsk produkt som endast är avsedd att användas som sittstöd av personer som behöver sådan hjälp vid bad, dusch och gå på toaletten (badrummet måste vara kompatibelt). Det är också ett transportalternativ för att transportera patienter från och till badrum eller toaletter. Produkten fyller en grundläggande funktion och gör livet för både den fysiskt funktionshindrade användaren och assistenten mycket enklare. Produkten bör endast användas inomhus. All annan användning är förbjuden.

Indikationer

För toalettstolen och duschstolen med 5" hjul är avsedda för personer med begränsad rörlighet som har svårt att gå, stå eller sitta utan stabilt stöd, eventuellt till följd av strukturella och/eller funktionella skador på de nedre extremiteterna (t.ex. amputation, konsekvenser av skador, muskuloskeletala/neuromuskuloskeletala rörelsestörningar). Hjälpmedlen är avsedda för personer som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan utföra sina dagliga hygienaktiviteter i vanliga duschkabiner eller badkar och som inte kan använda vanliga toaletter, inte ens efter modifieringar.

Dessutom, tack vare de fyra 5-tums hjulen: Oförmåga att framföra en rullstol (t.ex. vid begränsad styrka och greppfunktion eller bristande koordination mellan armar och händer).

Kontraindikationer

Toalettstolen och duschstolen ska inte användas av personer som inte kan bibehålla en stabil sittställning. Användare med kognitiv nedsättning måste övervakas under användning av produkten och det rekommenderas att en individuell bedömning av användarens hälsotillstånd görs före användning. Valet av ortopedisk produkt som är lämplig för ett visst medicinskt tillstånd måste alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller fysioterapeut. Dessutom måste du följa säkerhetsinformationen i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten kan användas inom hemvård, vård- och långtidsvård samt på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

Mobilex A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Denmark	Telefon: +45 87 93 22 20 Telefax: +45 87 93 17 77 Email: info@mobilex.dk
---	--

2. Säkerhetskrav

- Se till att alla personer som använder apparaten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i ett felfri skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte upp på apparaten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på enheten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Enheten får inte belastas med mer vikt än vad som anges i Tekniska data.
- Alla hjul MÅSTE vara i kontakt med golvet ALLTID under användning. Detta garanterar att produkten är korrekt balanserad och minskar risken för olyckor.
- Produktet får endast användas på ett stabilt underlag.
- När Produktet används i stillastående läge MÅSTE bromsarna vara inkopplade.
- Stå inte på fotstöden och sitt inte på kanten av sätet med benen på fotstöden.
- Produktet får endast användas inomhus och på plana ytor utan hinder.
- Håll alltid en stabil sittställning när du använder denna anordning och användarna bör inte lämnas på anordningen utan uppsikt. Ta bort sätesöverdraget endast när stolen används för gå på toaletten.
- Om stolsöverdraget placeras över stolens hål är det absolut nödvändigt att även placera hinken MED LÅGET under stolen.
- Toalettstolen och duschstolen får inte användas för att transportera personer eller föremål.
- Stå aldrig på fotplattorna när du stiger på eller av.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda. Innehållet i paketet är:

- ✓ 1 Huvudram inklusive 4 hjul utrustade med parkeringsbromsar;
- ✓ 1 Avtagbar sits och sittklädsel;
- ✓ 1 Avtagbar ryggstödram med armstöd;
- ✓ 2 Avtagbara fotstöd;
- ✓ 1 Sanitetshink med lock;
- ✓ 1 Verktygssats för montering;
- ✓ 1 Bruksanvisning;

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Toalettstol och duschstol levereras med: utbyttbar hygienhink, mjuk PU-sits, parkeringsbromsar, avtagbara fotstöd, uppfällbara armstöd etc. Produkten är tillverkad av material som är korrosions- och desinfektionsmedelsbeständiga. Stommen är tillverkad av pulverlackerat aluminiumrör.

Produkten består av följande delar:

1. Mjukt PU-ryggstöd
2. Vridbart armstöd
3. Fingerskruv för montering av ryggram
4. Avtagbar sanitetshink
5. Vändhjul med pedalbromsar
6. Avtagbart skydd för sätet
7. Mjuk PU-sits
8. Benstöd
9. Spak för att lossa fotstödet
10. Skruv för justering av benstöds längd
11. Vridbart fotplatta

Beskrivning av monteringen

- Lägg huvudramen upp och ner på golvet. Du ser fyra hål i de vertikala ramrörens ändar.
- Sätt in hjulkonstruktionerna i rören och fäst dem i önskat läge med medföljande bultar. Kontrollera att de sitter ordentligt genom att försöka dra ut dem. Om de glider runt, kontrollera att bulten går igenom både ramen och hjulkonstruktionen och dra åt bulten igen.
- Sätt ramen på hjulen och lås hjulbromsarna genom att trycka ner dem med en fotspets för att göra den fortsatta monteringen säker.
- Skruva loss båda ramens monteringsknoppar.
- Sätt in ryggstödsrören i hålen på huvudramens bakre del. Dra åt knopparna på båda sidorna av stolen och kontrollera att ryggstödet är stabilt.
- Sätt på locket på sanitetshinken och skjut in den i styrskenorna under sätet från stolens baksida. När hinken är på plats placera PU-sitsen på ramen genom att trycka på sitsens klämmor på ramen och lägg det avtagbara skyddet för sätet på PU-sitsen. Sits och skydd för sätet kan bytas ut.
- Sätt in fotstöds övre ände i hålet i huvudramens främre del och vrid fotstödet mot ramens främre del tills det är låst. Vik ut fotplattan och upprepa för det andra fotstödet.



Fig. 1: Montering av ryggstödet



Fig. 2: Montering av sätet



Fig. 3: Montering av fotstödet

Funktionsbeskrivning

VARNING! Koppla alltid in bromsarna när en användare sätter sig på eller reser sig från stolen, lämnar stolen med en användare i den eller ställer undan stolen, särskilt i backar.

Användning av armstöden

Armstöden kan lätt lutas upp och skjutas ner igen. Denna funktion kan göra det lättare för användaren att komma in och ut ur stolen. Genom att lyfta upp armstöden blir det lättare att utföra personlig hygien när man duschar.

VARNING! Lämna aldrig stolen obevakad med upplyfta armstöd när någon sitter i den.

Fotstödets funktionalitet

- För att justera fotstödet höjd, lossa fotstödsjusteringsskruven. Flytta fotstödet till önskad höjd och dra åt skruven. Upprepa för det andra fotstödet.
- För att ta bort fotstödet drar du i fotstödet avtagningshandtag. Fotstödet kan tas bort när det vänds bort genom att dra det uppåt. Upprepa för det andra fotstödet.
- Fotplattorna kan fällas uppåt.
- Dessa funktioner kan göra det lättare för användaren att kliva in i och ut ur rullstolen, samtidigt som de underlättar den personliga hygien när man duschar.

WARNING! Flytta aldrig stolen med avmonterade fotstöd när användaren sitter på den. Sätt alltid användarens fötter på fotplattorna när du flyttar stolen.

WARNING! Fotstödens längd måste anpassas till användarens längd.

OBS: Fotstödens längd är korrekt anpassad när användaren under sittande sitter på rullstolen, låren vilar platt på sätet och båda fötterna vilar på fotplattorna.

Användning av sanitetshinken

Toalett och badstolen är avsedd för personer som har svårt att använda vanliga toaletter.

För att använda Toalett och badstolen tar du bort avtagbart skydd för sätet och tar ut hinken ur stolen. Efter användning tar du ut hinken ur rullstolen igen och sätter tillbaka locket på hinken. Rengör hinken innan den används igen. Sätt tillbaka det avtagbart skydd för sätet. Om du vill byta ut sanitetsbehållaren kan den köpas som reservdel (artikelnummer: 305026).

Använda enheten med en standardtoalettskål

För att använda toaletten med enheten, ta bort toalettlocket, flytta sedan stolen bakåt över toalettstolen och ta bort säteslocket.

Tillbehör

Det finns inga tillbehör till den här enheten.

4. Tekniska data

Commode and shower chair	Art. 305001	Art. 305002
Sätesbredd	44 cm	44 cm
Djup i sätet	40 cm	40 cm
Sitthöjd (fram/bak)	53,5 / 52,5 cm	53,5 / 52,5 cm
Öppning av sätet	19 x 26 cm	19 x 26 cm
Övergångshöjd	44 cm	44 cm
Bredd över passagen	34,5 cm	34,5 cm
Sits/rygg vinkel	90 ° / 12°	91 ° / 12°
Avstånd mellan armstöd	43,5 / 44,5 cm	43,5 / 44,5 cm
Höjd på ryggstöd	41 cm	41 cm
Total bredd	54 cm	54 cm
Totalt djup	89 cm	89 cm
Total höjd	92 cm	92 cm
Max. användarvikt	120 Kg	120 Kg
Vikt	12,60 Kg	12,60 Kg

Produktetikett



Commode and shower chair

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660
Skanderborg
Tel. +45 87 93 22 20
www.mobilex.dk

REF 305001

5 740001 479980

MD CE i

SN 2506100001305001

2025.06.10

≤ 120 kg

54,5 cm →
44 cm →

0105740001479980 11250610 210001 240305001

	QR-kod till webbplatsen		Produktionsdato
	Producent		Belastningskraft
	Se bruksanvisningen		Max bredde
	Endast för inomhusbruk		serienr.
	CE-märkt produkt		Varenr
	Medicinsk utrustning		

Betydelsen av ikonerna

Exempel på produktetikett

5. Underhåll och skötsel

Vanlig smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring. Hela produkten kan desinficeras med ett kommersiellt tillgängligt desinfektionsmedel. Följ alltid desinfektionsmedlets tillverkares anvisningar för användning och säkerhet vid desinfektion.

Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel. Efter rengöringen bör hjullagren smörjas med olja regelbundet eller när hjulen börjar gnissla.

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- ✓ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✓ Kontroll av att ramen inte är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✓ Kontroll av slitdelar och byte av dem vid behov.
- ✓ Allmän åtdragning av komponenterna.

Rengöring av hink

Hinken måste tömmas och desinficeras efteråt. Använd inte vatten med en högre temperatur än 80 °C.

När du använder en ångrengörare/autoklav: Ta bort handtaget från hinken och rengör hinken efter att den har legat platt ner. Använd inte ångrengöraren/autoklaven på hinken i mer än 10 minuter. Placera inte hinken i en vinkel för att undvika deformation under rengöringen.

WARNING! Om produkten utsätts för mycket kalkhaltigt vatten kan en bindning och ansamling av kalk på hjullager och andra rörliga delar uppstå. I detta fall kan produkten rengöras med en kalkborttagare och därefter smörjas.

WARNING! Vid användning i starkt klorerade miljöer kan extra stark korrosion uppstå och garantin upphör att gälla.

WARNING! Om ramen är böjd eller trasig får produkten inte återanvändas utan måste bytas ut.

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att demontera stolen för transport. Stolen ska transporteras på ett stabiliserat och säkrat sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Om enheten måste transporteras utan att vara helt demonterad rekommenderas att fotstöden tas bort och att enheten lyfts genom att greppa tag i sätesrören på sidorna.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över apparaten ska apparaten kontrolleras tekniskt och desinficeras enligt punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Hjulen vrids inte smidigt och lätt.	Utrymmet mellan hjul och gafflar är fyllt med smuts.	Rengör utrymmet mellan hjul och gafflar från alla oavsiktliga föremål och element.

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas in till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garantier

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid oavsiktlig reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.

9. CE-försäkringen

Produkten har genomgått bedömningen av överensstämmelse i enlighet med EU:s förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkringen om överensstämmelse har utfärdats för enheten och finns tillgänglig på:

mobilex.dk/medias/2025-07/ce_305001_02_19008.pdf

eller via QR-koden till höger.

