

BADKARSSTOL

Art. 302022

Bruksanvisning



Aluminiumram inklusive
vridfunktion



Svängbar låsspak placerad
under sätet för enkel
rotation av sätet



Avtgbart ryggstöd
och arm stöd



Mjuk PU-sits
och ryggstöd

1. Introduktion

Gratis och tack för att du har valt an Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppgradera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

Den vridbara badsitsen är en medicinteknisk produkt som endast är avsedd att användas av patienter som på grund av invaliditet behöver stöd när de går i eller ur badkaret och under tvättning. Den vridbara sitsen gör det möjligt för patienten att passera upphöjda sidoväggar i ett badkar med eller utan hjälp av en medhjälpare. Fysiskt handikappade personer kan använda den som ett stabilt stöd och den ger enkel åtkomst till badkaret och även alla kroppsdelar under tvättning. Anordningen bör endast användas i badrum.

Indikationer

Produkten är avsedd för personer med funktionsbegränsningar, personer i rullstol och andra personer med begränsad rörlighet i ländryggen, knäna eller höfterna, samt för alla som har svårt att utföra daglig personlig hygien i ett badkar. All annan användning än den som anges ovan är förbjuden.

Kontraindikationer

Produkten är inte indicerad för patienter som inte kan upprätthålla korrekt kroppsbalans i sittande och stående position. Duschpallen får inte användas om användaren har nedsatt perception. Kontraindikationer kan inte relateras till en specifik klinisk bild, och de beror på individuell utvärdering av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av rätt ortopedteknisk produkt för ett visst tillstånd bör alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller fysioterapeut. Dessutom måste du följa säkerhetsinformationen i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten kan användas inom hemvård, vård- och långtidsvård samt på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

Mobilex A/S	Telefon:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Säkerhetskrav

- Se till att alla personer som använder apparaten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i ett felfri skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte upp på apparaten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på enheten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Enheten får inte belastas med mer vikt än vad som anges i Tekniska data.
- Var försiktig när du monterar eller justerar delar av apparaten.
- Vi rekommenderar att du tar hjälp av en assistent för att komma i och ur det vridbara badkaret.
- Det vridbara badkaret får endast användas i traditionella badkar med lika höga sidor. Se till att låsbultarna är korrekt justerade före användning och att de 4 armarna ligger plant och stabilt på sidorna.
- Använd endast det vridbara badkaret som sittplats. Stå inte på sitsen.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda. Innehållet i paketet är:

- ✓ 1 Basram med 4 armar;
- ✓ 1 PU-säte;
- ✓ 1 Ryggstöd i PU;
- ✓ 2 Ryggstödsrör;
- ✓ 2 Armstöd;
- ✓ 1 Bruksanvisning;

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Den vridbara baddaren består av en basram av aluminium, en mjuk PU-sits och ett PU-ryggstöd. De fyra armarna på basramen är täckta med skyddande gummikåpor/stöd som ska läggas ovanpå badkarets sidoväggar. Enheten är utrustad med en mekanism som gör att sitsen kan vridas. Denna funktion gör det ännu enklare att komma i och ur badkaret.

Produkten består av följande delar:

1. PU-ryggstöd
2. Avtagbart armstöd
3. PU-säte
4. Gängad stång för festsättning av stolen
5. Gummistöd (för badkar)
6. Spak för vridlås (under sätet)

Beskrivning av monteringen

Skjut in ryggstödsrörens ändrar i hålen på baksidan av huvudramen och lås dem med clips. Fäst PU-ryggstödet på rören. Skjut in armstödens rörändrar i hålen på sidorna av huvudramen genom att trycka på knappen som sitter på röret på båda sidor.

Funktionsbeskrivning

Positionering av enheten

Placera badsitsen på badkaret. Kontrollera att alla 4 armarna ligger plant och stabilt på badkarets sidor. Fäst huvudramen med de 2 gängad stång som sitter under ramen så att de trycker mot badkarets sidor.

Justering av sätets position

Det är möjligt att justera sitsens position (åt vänster eller höger) genom att flytta sitsens montering till något av de andra justeringshålerna på den centrala fästplattan (3 tillgängliga positioner). Detta görs genom att skruva loss plastknoppen som är placerad under sitsen. Flytta sitsen till en ny position, montera och dra åt plastvredet igen. Kontrollera om sitsen kan rotera fritt när låsspaken lyfts.

Användning av stolen efter installation



Vrid sitsen mot badkarskanten genom att dra upp låsspaken och rotera sitsramen. Vänd dig bakåt mot sitsen, placera händerna på armstöden och sätt dig på det vridbara badkaret. Dra upp låsspaken och rotera dig själv med sitsramen mot mitten av badkaret. Se till att låsspaken är låst i det läget, så att sitsen inte kan röra sig oavsiktligt. Upprepa stegen ovan för att ta dig ur badkaret.

Tillbehör


Det finns inga tillbehör till den här enheten.

4. Tekniska data

Sliding bath bench	Art. 302022
Total bredd	71 cm
Total längd	54 cm
Total höjd	57 cm
Sittbredd x djup	41 x 34 cm
Bredd mellan armstöd	56 cm (överst) / 51 cm (längst ner)
Höjd på armstöden	38 cm
Produktens vikt	4,88 kg
Max. vikt för användaren	130 kg
För badkarsbredder (invändigt)	57-66 cm

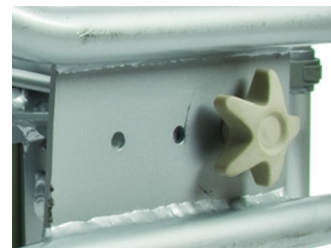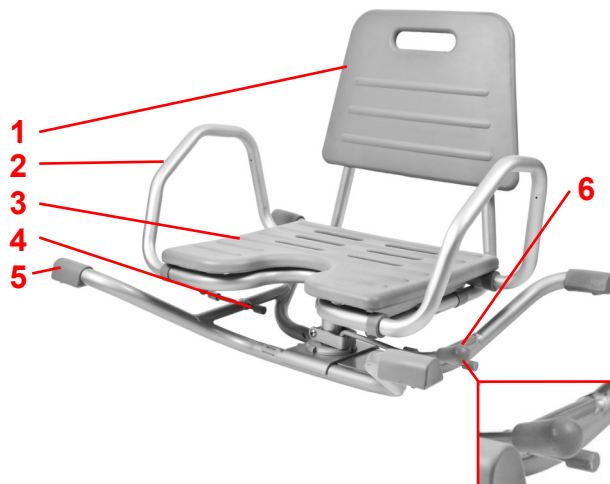

Produktetikett

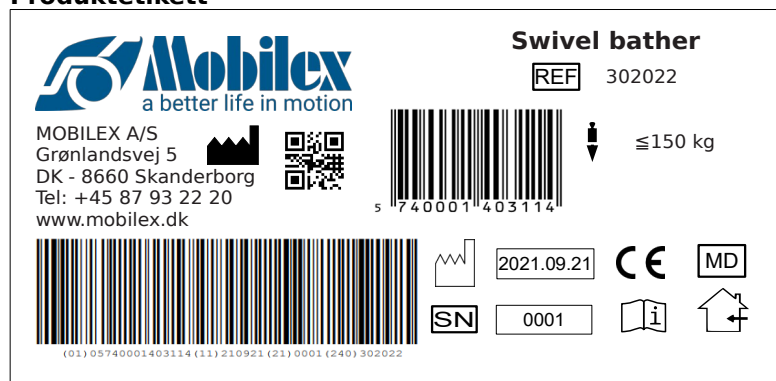

Exempel på produktetikett

	QR-kod till webbplatsen		CE-märkt produkt
	Producent		Produktionsdato
	Se bruksanvisningen		Max belastning
	Serienr.		Medicinsk utrustning
	Varenr		Endast för inomhusbruk

Betydelsen av ikonerna

5. Underhåll och skötsel

Vanlig smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring. Hela produkten kan desinficeras med ett kommersiellt tillgängligt desinfektionsmedel. Följ alltid desinfektionsmedlets tillverkares anvisningar för användning och säkerhet vid desinfektion.

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- ✓ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✓ Kontroll av att ramen inte är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✓ Kontroll av slitdelar och byte av dem vid behov.
- ✓ Allmän åtdragning av komponenterna.

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att demontera stolen för transport. Stolen ska transporteras på ett stabiliserat och säkrat sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över apparaten ska apparaten kontrolleras tekniskt och desinficeras enligt punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Den mjuka sittdynan är inte fixerad i sitt läge (skakar eller rör sig)	Ett eller flera av sitsens fäststift är inte korrekt isatta i ramens hål	Ta ut sitsen ur badkaret och vänd den upp och ned för att kontrollera om sitsens hållarstift är korrekt isatta. Om nödvändigt, tryck på sitsdynan genom att trycka in alla stift i sina hål på huvudramen
Sitsen ligger inte plant och stabilt på badkarets sidor	Gummiarmstöden är inte i samma parallella och plana position	Kontrollera om alla 4 gummistöden är placerade på ett sätt så att deras plana sidor ligger an mot badkarets botten. Justera gummistödens position om det behövs

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas in till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garantier

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid oavsiktlig reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.

9. CE-försäkringen

Produkten har genomgått bedömningen av överensstämmelse i enlighet med EU:s förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkringen om överensstämmelse har utfärdats för enheten och finns tillgänglig på:

mobilex.dk/medias/2021-07/ce_aqua_drejbar_badekarsaede_aluminium_302022_8307.pdf

eller via QR-koden till höger.

