


PR55320

Ett flexibelt hjälpmedel för strumpbyxor, med fästa handtag i vävband. Plastbladet är format för att hålla strumpbyxorna tills de kan dras upp inom räckhåll. Mycket lätt och enkla att använda. Handtaget kan justeras vid behov.

Längd remmar: 91 cm.**BRUKSANVISNING**

1. För enklare kontroll, knyt ihop ändarna på remmarna.
2. Rynk upp dig till strumpan. Tryck in strumpstödet i en U-formad ränna.
3. Dra strumpan över den smala änden av rännan utan remmarna.
4. Skjut upp den rynkade strumpan i de två skårorna på sidan av strumpstödet. Strumpans öppning ska inte sticka ut längre än de två skårorna och strumpans tå ska sitta tätt över den smala änden. (se figur 1)
5. Strumpans häl ska vara under strumpstödet. Använd lite talk vid ingången till strumpstödet för att hjälpa foten att glida in i strumpstödet lättare.
6. Sitt på kanten av sängen eller stolen. Placera strumpstödet på golvet. Ta tag i remmarna med båda händerna och för strumpstödet över foten. Dra i remmarna och för strumpstödet tills strumpan sitter helt på foten. (se figur 2)

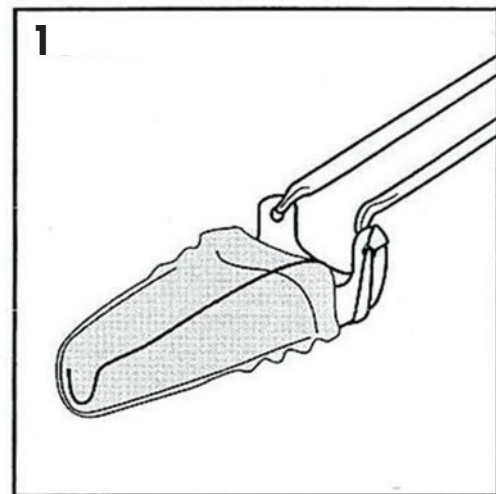

OBS! Den svarta gummicirkeln är fäst vid strumpstödet enbart för att förhindra att strumpan glider av när den används.



Rehaforum Medical GmbH
Daimlerstr. 12a
25337 Elmshorn
Germany

Distributed by:
Able2 Europe B.V.
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

Able2 UK Ltd.
www.able2.uk
Able2 Iberia S.L.
www.able2.es



MADE IN
CHINA