

Badkarsbräda

Art. 302031, 302034


Bruksanvisning



Sittbänk för badkar Justerbar för att passa
de vanligaste badkarsbredderna



Handtaget är enkelt att montera.
Ett mynt räcker för att dra åt
skruvarna.

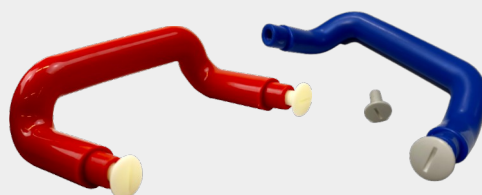

Ersättningshandtag finns i
rött eller blått



Gummistöden är enkla att
montera. Inga verktyg
behövs. Skruvarna kan
dras åt för hand.

1. Introduktion

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppgradera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

Duschbrädan är en medicinsk produkt som är avsedd att ge stabilt sittstöd när funktionshindrade personer använder ett badkar. Den kan justeras för att passa de flesta badkarens bredd.

Indikationer

Duschbradan är överlägg för vanliga badkar, avsedda att användas som sittanordning av personer med funktionsbegränsningar, personer i rullstol och andra personer med begränsad rörlighet i ländryggen, knäna eller höfterna, och för alla som har svårt att sitta lågt och resa sig upp igen från badkarets botten när de utför daglig personlig hygien. Det är förbjudet att använda sätet för andra ändamål än de som anges ovan.

Kontraindikationer

Denna produkt är inte rekommenderad för de patienter som inte kan upprätthålla en korrekt kroppsbalans i sittande och stående ställning. Apparaten får inte användas om användaren har problem med nedsatt perception. Kontraindikationer kan inte relateras till en specifik klinisk bild, utan de beror på en individuell bedömning av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av ortopediskt hjälpmedel som är lämpligt för en viss klinisk bild måste alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller sjukgymnast. Observera dessutom säkerhetsinformationen i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten kan användas inom hemvård, vård- och långtidsvård samt på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

2. Säkerhetskrav

- Se till att alla personer som använder apparaten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i ett felfri skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart sluta använda apparaten och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Stå inte på apparaten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på enheten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Enheten får inte belastas med mer vikt än vad som anges i Tekniska data.
- Duschbrädan måste anpassas exakt till badkarets bredd.
- Kontrollera alltid produktens stabilitet före användning.
- Duschbrädan måste monteras så att den inte kan röra sig i badkaret.
- Badbrädans yta måste ha ett bra stöd från badkarets sidor.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda. Innehållet i paketet är:

- ✓ 1 Duschbräda;
- ✓ 1 Handtag;
- ✓ 4 Kantstopp;
- ✓ 1 Bruksanvisning;

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Duschbrädan är tillverkad av återvinningsbar vit plast. Den släta ytan gör den lätt att rengöra. Duschbrädan är lätt att montera. De lätt justerbara, kantstopp stöder brädan optimalt på insidan av badkaret. Handtaget som levereras som standard är lätt att greppa och ökar säkerheten.

Beskrivning av monteringen

Handtaget måste monteras i hålen med de 2 medföljande skruvarna. Skruvarna monteras från brädans undersida uppåt och skruvas in i handtaget. Detta kan göras med en skruvmejsel eller till och med ett vanligt mynt. För att montera kantstoppen, skruva loss skruven från toppen av kantstoppet. Montera den sedan genom att sätta i skruven från skivans ovansida och skruva fast kantstoppet genom att skruva fast det på undersidan av brädan. Upprepa för resterande kantstopp. Upprepa för de återstående stöden.

Funktionsbeskrivning

Allmän användning

Justera placeringen av alla kantstopp så att badbrädan inte rör sig från sida till sida när den sätts på badkaret. För att justera ett kantstopp behöver du bara lossa det, flytta det och dra åt igen. Brädans sidor måste ligga på badkarets sidor för att få ett stabilt stöd.


Tillbehör

Det finns inga tillbehör till den här enheten.

4. Tekniska data

Shower board	Art. 302031	Art. 302034
Höjd	16,4	18,3 cm
Bredd	69 cm	75,7 cm
Lämplig innerbredd för ett badkar	41 - 62 cm	38 - 64 cm
Längd (djup)	35 cm	35 cm
Vikt	2,48 kg	2,35 kg
Max. användarvikt	150 kg	150 kg

Produktetikett

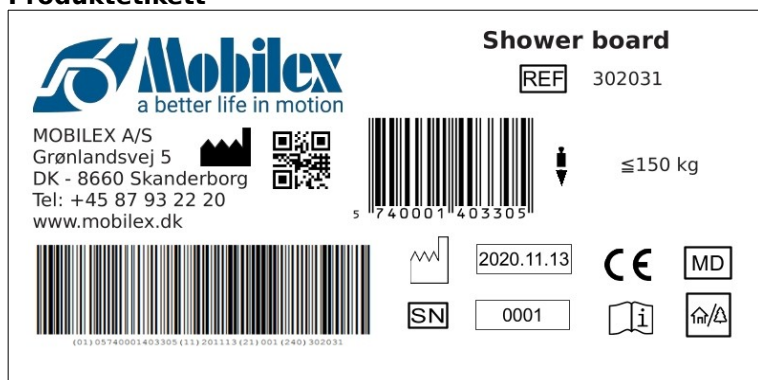

Exempel på produktetikett

	QR-kod till webbplatsen		Producent
	CE-märkt produkt		Varenr
	Se bruksanvisningen		Max belastning
	Medicinsk utrustning		Produktionsdato
	För användning inomhus/utomhus		Serie nr.

Betydelsen av ikonerna

5. Underhåll och skötsel

Vanlig smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring. För desinfektion, använd endast desinfektionsmedel som är certifierade för användning med medicintekniska produkter och som finns tillgängliga lokalt.

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar följande:

- ✓ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✓ Kontroll av att ramen inte är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✓ Kontroll av slitdelar och byte av dem vid behov.
- ✓ Allmän åtdragning av komponenterna.

Rekommenderad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att du viker ihop apparaten för transport. Anordningen ska transporteras på ett stabilt och säkert sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över produkten ska apparaten kontrolleras tekniskt och desinficeras enligt punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Duschbrädan sitter löst på badkaret	Fötter är inte tillräckligt nära badkarskanten eller är inte tillräckligt åtdragna.	Lossa och justera fötterna och dra åt dem igen

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas in till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garantier

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid oavsiktlig reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.

9. CE-försäkran

Produkten har genomgått bedömningen av överensstämmelse i enlighet med EU:s förordning: MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkran om överensstämmelse har utfärdats för enheten och finns tillgänglig på:

mobilex.dk/medias/2021-09/ce_badebraedt_med_haandtag_302030_31_34_8564.pdf

eller via QR-koden till höger.

