

ANVÄNDNING:

Duschpallen med höjdjustering ökar självständigheten vid dusch och daglig personlig hygien genom att minska muskeltrötthet från att stå upp samt risken för att halka. De halkfria doppskorna ger ett stabilt grepp mot golvet, och de höjdjusterbara benen gör det enkelt för användaren att anpassa pallen efter önskad sitthöjd.

Duschpallen kan dessutom ställas in med olika höjder på fram- och bakbenen. Genom att ha frambenen lägre än bakbenen kan användaren få en mer ergonomisk sittställning, vilket underlättar både stående och sittande under duschen.

Tack vare sin flexibilitet kan pallen placeras även på ojämna golv, vilket är vanligt i många duschutrymmen. Den är även lätt att flytta tack vare sin låga vikt.

INDIKATIONER OCH KONTRAINDIKATIONER:

Duschpallen med justerbar höjd är avsedd för personer med nedsatt rörlighet i ländrygg, knän eller höfter, samt för personer som har svårt att stå under dusch och vid daglig personlig hygien. Användaren måste ha tillräcklig balans vid både sittande och stående rörelser samt kunna bibehålla en stabil sittande position. Pallen bör inte användas av personer med balansproblem eller perceptuella störningar.

SÄKERHET:

- Överskrid aldrig den maximala användarvikt som anges i monteringsanvisningen.
- Säkerställ före varje användning att duschpallen är korrekt monterad och står stabilt.
- Använd endast duschpallen på ytor som är fria från hinder.
- Följ noggrant bruksanvisningens instruktioner vid montering.
- Gunga inte på duschpallen - det kan göra att benen glider, välter eller sjunker.
- Se alltid till att duschpallen står på alla tre ben.
- Gör inga ändringar på duschpallen eller dess komponenter.
- Använd inte duschpallen om den är skadad eller modifierad. Sprickor eller deformationer kan allvarligt försämra säkerheten.
- Använd heller inte duschpallen för andra ändamål än de avsedda.
- Förvara inte duschpallen utomhus.

UNDERHÅLLSINFORMATION

Produktens underhåll består av rengörings- och desinfektionsrutiner. För att säkerställa säker användning och upprätthålla en god hygiennivå bör användaren utföra dessa rutiner före varje användning. Användaren ansvarar för att kontrollera enhetens och dess komponenters strukturella integritet. Följ stegen nedan för rengörings- och desinfektionsprocedurerna:

1. Handskar bör bäras.
2. Avlägsna synlig smutsen innan användning för att få den mest exakta desinfektionen.
3. Använd vatten eller ett icke-aggressivt rengöringsmedel för rengöringsproceduren.
4. Torka av med en torr och ren trasa.

Alternativt kan produkten rengöras i kabinett på **max 60 °C**. **Observera:** Om mjuksits används måste den tas bort före.

Återanvändningskrav


Produkten kan återanvändas av andra användare. Innan återanvändning måste den rengöras och desinficeras noggrant. Produkten ska även kontrolleras av en kvalificerad återförsäljare innan den lämnas vidare.

Korrekt avfallshantering

Kasta inte produkten i det vanliga hushållsavfallet. Kontakta dina lokala myndigheter för information om korrekt och miljövänlig kassering.







Incidentrapportering

Om en allvarlig incident inträffar med produkten, kontakta info@leuforia.se samt ansvarig myndighet.

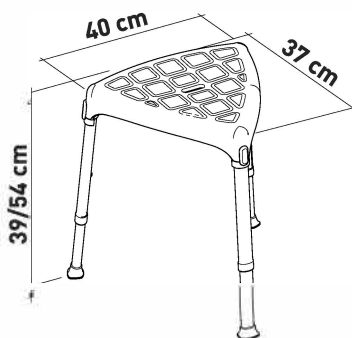

TREKANTIG DUSCHPALL – HÖJDJUSTERBAR

ART# PR50934

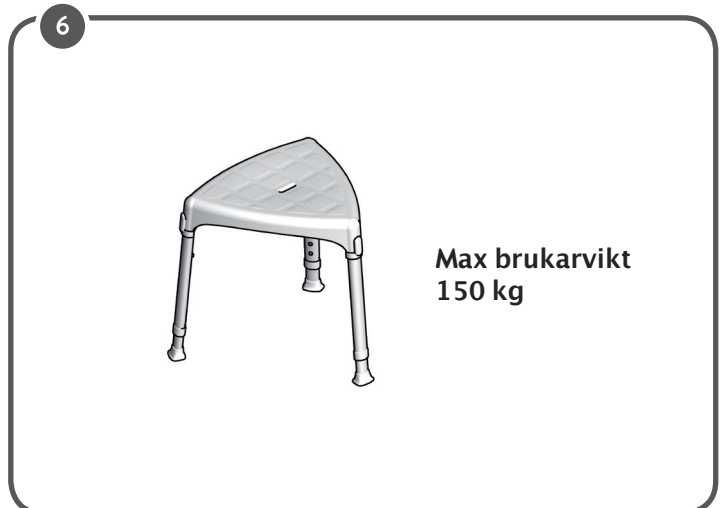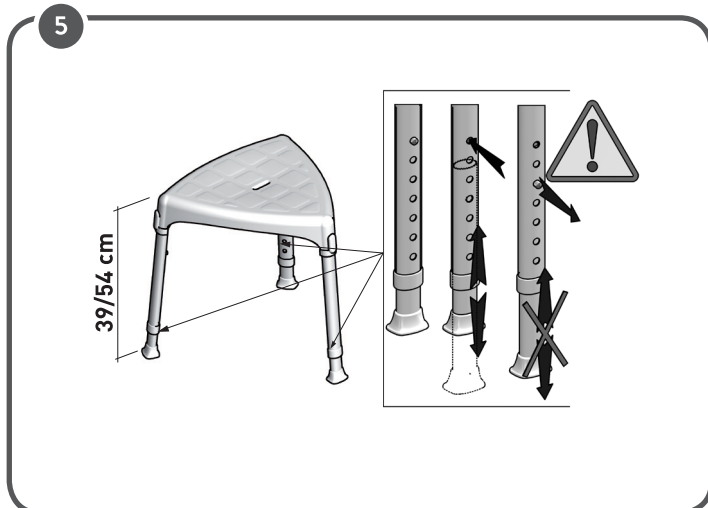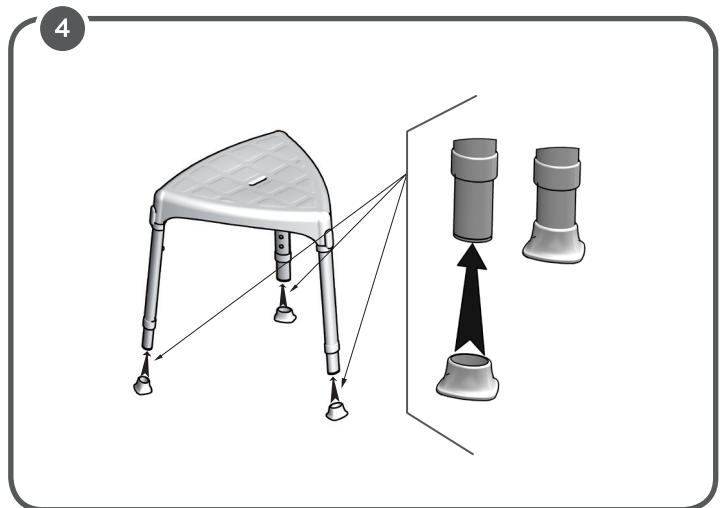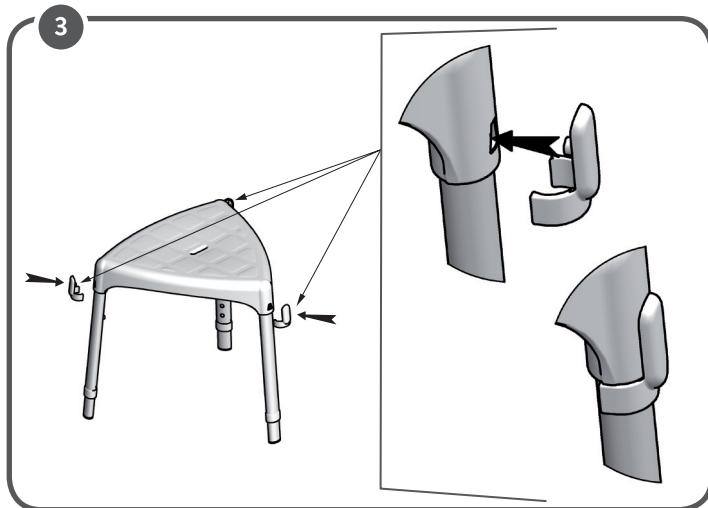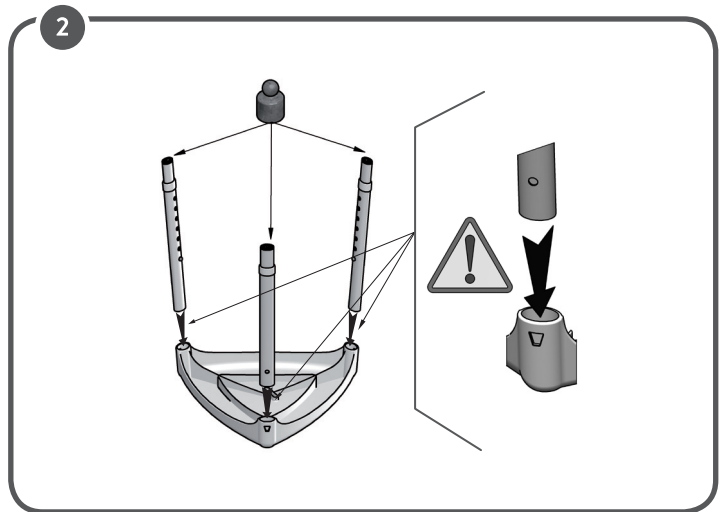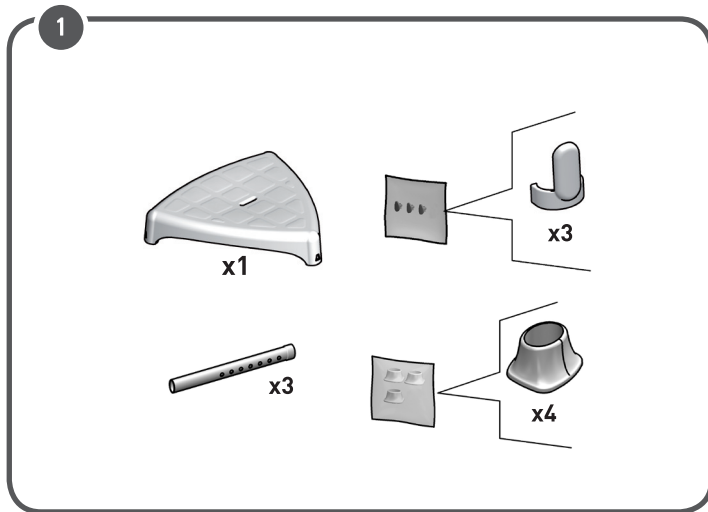

TILLBEHÖR: MJUKSITS

PR50935-BL: LJUSBLÅ
PR50935-GR: LJUSGRÅ

