



Denna vändkudde ger ett stabilt och tryggt stöd när en brukare behöver vändas i sängen. Den har ett stadigt handtag på varje sida och ytan är av antihalk så den ligger stadigt under vändningen. Den blåses upp med en handpump och luftventilen är dold. Genom att reglera mängden luft kan man anpassa komforten. Överdraget är tvättbart 40 grader i tvättmaskin.

2 års garanti från inköpsdatum, förutsatt att den hanteras korrekt.

Mått 55 x 41 x 16 cm. Den är CE märkt och MD classificerad

• Bruksanvisning

- Trä på överdraget och blås upp innerkudden (pump ingår).
- Placera kudden långt upp mot sätet, under knäna på den som ligger på rygg. Underbenen ska ligga i stödspåren. (Fig.1).
- Vrid upp kudden och placera den i upprätt läge (Fig.2).
- Stöd patientens arm med ena handen och håll i kuddhandtaget med den andra, vänd personen i sidled (Fig.3).
- Efter att ha utfört nödvändig vård, vänd tillbaka patienten på ryggen (Fig 2)
- Vik ner kudden (Fig 1) och dra ut den nedåt.
- OBS Vändkudden ska endast användas under vändningen. Inte som en stöd eller positioneringskudde vid viloläge.



Rengöring

Överdraget har en dragkedja så det kan tas av och tvättas 40 grader i maskin. Stäng blixtlåset innan tvätt. Kan torktumlas i låg temperatur. Överdraget måste vara helt torrt innan det tas på. Rengör innerkudden med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Se till att den är helt torr innan överdraget tas på.

Klinisk utvärdering

Jag har testat vändkudden tillsammans med sjukgymnast med en tonåring med flerfunktionsnedsättning, smärtor, benskörhet och sublaxation i höften som vanligtvis har svårt att vändas utan smärta. Det fungerade bra, både ungdom och assistent tyckte det var ett bra hjälpmedel. Det var väldigt lätt för vårdaren att vända själv till skillnad från att ha en mjuk positioneringskudde mellan knäna och försöka vända utan att orsaka smärta.

För just den här ungdomen används annars positioneringskuddar för att hålla benen neutrala utifrån höftposition abduction/adduktion, vilket är bökgigare och tyngre för assistent att vända med än här där handtaget på vändkudden gjorde det hela enkelt och för ungdomen skonsamt.

2024-10-30 Elin Widmark Specialistarbetsterapeut Region Värmland