

Toaförhöjning med inbyggda armstöd



Användaranvisning

AA2169 Toaförhöjning med inbyggda armstöd kan användas på alla vanliga toalettstolar. Beroende på toastolsmodell kan den ordinarie sittringen och locket behöva avlägnas.

Armstöden fästes när toaförhöjningen vänds på t ex ett bord. Armstöden är märkta L för vänster sida och R för höger sida. Varje handtag fästes med 3 skruvar i två fästen. Ett fäste sitter mitt på sidan och dom två övriga på ryggdelen. För att skruva behövs en stjärnmejsel.

På toaförhöjningen finns tre fästpunkter för användning mot toastolens porslin. Dessa är monterade. Lägg den självhäftande antihalkdynan på plats. Tillse att den fäster i toaförhöjningen. Ställ in önskad bredd med dom skruvar som sitter på fästena och lås på toastolen.. Den kan rengöras med vanliga renföringsmedel.

Mått: Höjd 10 cm. Sätets storlek 21 x 25,5 cm. Sittringens invändiga mått är bredd 26 cm och längd 27 cm. Bredd mellan handtagen 45 cm. Max brukarvikt 180 kg.