

Nyckelgrepp

AA6242/091102243 Nyckelgrepp i plast där 2 vanliga nycklar sätts fast och sedan viks in i handtaget.

Bruksanvisning:

För att sätta nycklar på plats lossar du det stora handtaget på sidan och tar ut skruven. Läggs nu in dina nycklar med hålet i nyckelns övre del mot nyckelgreppets övre del. Sätt tillbaka skruven i nyckelgreppet och fäst med det stora handtaget. När du inte använder nycklarna kan du vrida in dem på insidan av nyckelgreppet. Hur hårt du behöver vrida för att få fram nycklarna ur nyckelgreppet bestämmer du genom att dra det stora handtaget så hårt eller löst som du själv önskar. Nyckelvredet kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel.

