



Rolko AIRpad Användaranvisning



Rolko Airpad är en enkammardyna som är luftfylld. Lufttrycket regleras utan pump. Dynan har ett aktivt mikroklimat. Kombinationen av lämpligt lufttryck och viskoelastiskt skum ger god sittkomfort. Tekniken försvårar uppkomsten av sittersår. Den underlättar även läkning av uppkomna sittersår. Dynan kan användas både i rullstol och på stolar. För bästa sittkomfort ska det vara 1,5 cm - 2 cm avstånd mellan dynans undersida och den lägsta punkten på brukarens kropp (vanligen sittbenet). Tänk på att dynans överdrag ska vara slätt.

Rolko AIRpad kan användas förebyggande och i pågående behandling av sittersår enligt IEPU-AP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) nivå 1. AIRpad bör inte användas tillsammans med andra dynor eller överdrag.

AIRpad anpassas för brukaren genom lämpligt lufttryck i dynan. Sittställningen stabiliseras av det viskoelastiska minnesskummet i dynan. Som tillbehör finns inkontinensöverdrag.

På undersidan är dynan och inkontinensöverdraget grått, med antiglidfunktion. Den gråa sidan ska ligga nedåt vid användning. Var noga med att ventilen ska vara fri.

Brukarvikt	Minimum	30 kg
	Max brukarvikt	150 kg

Storlekstabell dyna

SK-AIR-380X400X80-S	Bredd 38 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm	Vikt 680 ggr
SK-AIR-400X400X80-S	Bredd 40 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm	Vikt 720 gr
SK-AIR-430X400X80-S	Bredd 43 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm	Vikt 760 gr
SK-AIR-430X430X80-S	Bredd 43 cm	Djup 43 cm	Höjd 8 cm	Vikt 830 gr
SK-AIR-450X400X80-S	Bredd 45 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm	Vikt 800 gr
SK-AIR-450X450X80-S	Bredd 45 cm	Djup 45 cm	Höjd 8 cm	Vikt 860 gr
SK-AIR-480X430X80-S	Bredd 48 cm	Djup 43 cm	Höjd 8 cm	Vikt 880 gr

Storlekstabell inkontinensöverdrag

SK-COVER-380X400X80-I-S	Bredd 38 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm
SK-COVER-400X400X80-I-S	Bredd 40 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm
SK-COVER-430X400X80-I-S	Bredd 43 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm
SK-COVER-430X430X80-I-S	Bredd 43 cm	Djup 43 cm	Höjd 8 cm
SK-COVER-450X400X80-I-S	Bredd 45 cm	Djup 40 cm	Höjd 8 cm
SK-COVER-450X450X80-I-S	Bredd 45 cm	Djup 45 cm	Höjd 8 cm
SK-COVER-480X430X80-I-S	Bredd 48 cm	Djup 43 cm	Höjd 8 cm

Att använda AIRpad

Lägg AIRpad på ett plant underlag med den grå sidan neråt. Kontrollera att ventilen sticker ut i överdraget. Ventilen har två lägen. När AIRpad ska fyllas med luft vrids ventilen medsols (åt höger) så att det vita strecket är uppåt.

Nu fylls dynan automatiskt. När dynan är full med luft vrids ventilen motsols (åt vänster), så att det vita strecket på ventilen möter den vita punkten. Känn på dynan så att trycket är behagligt.



Om dynan har för mycket luft, vrid ventilen så att det vita strecket är uppåt och tryck ut luft. Vrid tillbaka så att det vita strecket på ventilen möter den vita punkten. Känn återigen på dynan så att trycket är lämpligt.





Framåt

När dynan läggs i stolen/rullstolen skall ventilen vara riktad framåt i brukarens sittriktning.

Sätta på överdrag:

Öppna ventilen så att det vita strecket är uppåt och tryck ut lite luft. Stäng sedan ventilen. Öppna överdraget i blixlåset. Lägg dynan i överdraget. Börja med ventilsidan. Se till att ventilen ligger på plats i öppningen på överdraget. Fortsätt med den övriga dynan. Dynans gråa sida ska ligga nedåt precis som överdragets gråa sida.

Stäng blixlåset så att låset ligger i sin ficka på överdraget. Öppna ventilen och fyll dynan. Stäng sedan ventilen.



Ta av överdrag:

Öppna ventilen och släpp ut litet luft ur dynan. Öppna blixlåset och ta ut dynan ur överdraget. Kontroller att ventilen inte skadas.





Rengöring och desinfektion

Dynan

Stäng ventilen. Ventilen är stängd när strecket på ventilen möter den vita punkten.

Dynan rengöres med ett mildt rengöringsmedel och ytdesinficeras.

Överdraget och inkontinensöverdraget kan tvättas i maskin på 60 grader.
Använd inte antistatmedel. Tvättmärkning finns på överdragets insida.

Kontrollera en gång per vecka ventilens funktion genom att tömma dynan och återfylla den.
Om möjligt låt dynan vara utan luft en natt vid detta tillfälle.
Dynan passar för återanvändning. Kontrollera om överdragen behöver bytas.

Använd inte dyna eller överdrag tillsammans med andra dynor och överdrag.

Dynan pumpar upp sig själv. Använd inte pump.

Tänk på max brukarvikt.

Dynan ska inte ligga i direkt solljus för länge.
Den ska heller inte utsättas för extremt höga temperaturer.

Dynan får inte utsättas för vassa föremål. Detta kan skada luftkammaren.

Bär inte dynan i ventilen.

Stäng ventilen när dynan rengöres.

