

ANVÄNDARANVISNING FÖR ROTERPLATTA



Före överflyttningen

Börja med att kontrollera att rullstol m.m. står på lagom avstånd för överflyttningen, och att bromsarna är låsta. Och som vid all förflyttning, måste personal och brukare veta innan, förflyttningen görs, vart och hur överflyttningen är tänkt, för att undvika fallskador. Det är också bra att räkna ner när man gör flyttningen.

Sätt sedan brukaren i sittande läge, sätt gärna på ett vårdbälte, (för att minimera risken för fall.) Be brukaren att sätta fötterna på roterplattan. Låt brukaren lägga sina händer på dina axlar eller runt midjan (beroende på brukarens längd), räkna ner, och hjälp brukaren upp i stående läge. Vänta lite, låt brukaren hitta balansen, rotera sedan brukaren till önskat läge, rullstol m.m. Hjälp brukaren att sätta sig ner.