

Vårdbälte universal

AA8898/091122084 Vårdbälte universal

Universal vårdbälte är vadderat och har stående handtag, med tillägget även vadderad förlängningsrem som kan justeras från 51 till 145 cm. Bältet har samma bredd på hela längden. Det innebär att bältet inte har någon framsida eller baksida. Bältet kan därför placeras/sättas i det läge som passar bäst. För att undvika vårdrelaterade infektioner är den vadderade delen av bältet impregnerad med en bakteriedödande gel.

Bältet sätts runt brukarens midja med handtagen utåt. Justera bältet till önskad längd med bekväm och säker passform. Lås bältet. Alla lås är av quick-release-typ. Kontrollera gärna en extra gång att bältet sitter riktigt och är bekvämt för brukaren.

Kan tvättas i 95 grader och torkas av med 75-procentig alkohollösning eller gel.



Fakta

Längd: 51–145 cm
Rengöring: 95 °C maskintvätt eller 75 % alkohollösning/gel

