



## Axcess Väskramper



Artikel	Storlek
091169739	30,5 cm
091169762	91,5 cm
091169770	122,2 cm
091169788	152,5 cm
091169796	182,9 cm



## Användaranvisning

Axcess Väskramper är färdig att använda vid leverans. Tillse att rampen är utan transportskador. Väskramperna kan användas för både gående och rullstolar.

Placera rampen med märkningen TOP framåt/uppåt. På denna del av rampen finns permanenta hål som kan användas om underlaget har fästen som kan användas. Rampen kan användas även om underlaget saknar fästen.

Vik ut rampen och tillse att rampens nedre del ligger stadigt mot underlaget.

Överbelasta inte rampen. Max brukarvikt 272 kg.

När Du väljer ramp tänk på att rampens längd påverkar vinkeln/höjden. En längre ramp ger lägre vinkel/höjd och detta gör det lättare att använda rampen.

Specifikation	091169739	091169762	091169770	091169788	091169796
Bärhandtag	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Längd	610 mm	915 mm	1220 mm	1525 mm	1829 mm
Bredd	737 mm	737 mm	737 mm	737 mm	737 mm
Ihopfälld	610 x 381 x 76 mm	914 x 381 x 76 mm	1219 x 381 x 76 mm	1524 x 381 x 76 mm	1829 x 381 x 76 mm
Vikt	5 kg	6,8 kg	9,5 kg	11,8 kg	16,4 kg
Max brukarvikt					