

Devon MKIII fällbart stödhandtag



Användaranvisning

Devon MKIII är fällbart. Den ovala handtagsformen ger ett bra grepp. Fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och enkelt kan fällas. I uppfällt läge låser handtaget 20 cm från vägg. Fjäderstyrningen gör att handtaget långsamt fälls framåt/nedåt. För att starta fjäderstyrningen lyfts handtaget något i uppfällt läge. I nedfällt läge trycks handtaget mot fästet och lyfts något. Fjäderstyrningen startar. Fästplattan är 23 cm x 12 cm. Handtagets bredd är 5 cm och djupet är 2,5 cm. Handtaget finns i två längder. Max brukarvikt 127 kg.

Stödhandtaget bör monteras av fackman. Handtagets alla fästpunkter bör användas. Stödhandtaget kan monteras i uppfällt läge. Det kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

091173509

Längd 55 cm

091165695

Längd 69 cm