

Rolyan strumppådragare för kompressionsstrumpor



Bruksanvisning

A75440 small är 13 cm bred och 14 cm hög. A75441 large är 15 cm bred och 14,5 cm hög.

Ställ strumppådragaren på ett plant underlag med den främre delen uppåt. För på strumpan med rätsidan ut. Strumpan bör fästa i de fördjupningar som finns på strumppådragarens framsida.

Vänd nu strumppådragaren så att strumpan hänger ner. För in foten i strumppådragaren. Dra strumpan så att den sitter på plats på benet. Använd det bomullsband som är fäst på strumppådragaren.

Strumppådragaren kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.