



Swiveling svängbart badkarssäte



Användaranvisning

AA1280/091073162 Swiveling svängbart badkarssäte är lätt att montera. I kartongen är sätet monterat på ramen. Sätt i de båda delar som ska stå på badkarets kant. Den plana delen av gummifoten ska stå på badkarskanten. Ställ in önskad bredd på sidostöden och lås fast med vingmuttrarna som är monterade i ramen. Med spaken på sidan låser man stolen i önskat läge. Det finns fyra lägen. Den kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Mått: Sätets storlek 44,5 x 40,5cm. Ryggstödet höjd är 35,5cm. Sätets ställbara bredd 53,5cm – 63,5cm. Max brukarvikt 102kg.