

Easyleaver uppresningsstöd



Användaranvisning

Easyleaver uppresningsstöd är tillverkad i stål. Dom kan användas till alla typer av sängar och rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Börja med att fästa uppresningsstödet vid sänggavelns långsida genom att fästa dom mindre remmarna runt det korta röret på Easyleaver och i sänggavelns långsida. Sätt handtagsbågen på plats och säkra med låsclipsen.

Fäst dom längre remmarna i bottenrören på Easyleaver och dra remmarna under sängbotten till långsidans sänggram och fäst. Handtagsbågen är 47 cm hög.

AA3470	Längd 62 cm	Bredd 36,5 cm	Max brukarvikt 108 kg
AA3471	Längd 78 cm	Bredd 44 cm	Max brukarvikt 160 kg