


Strumppådragare

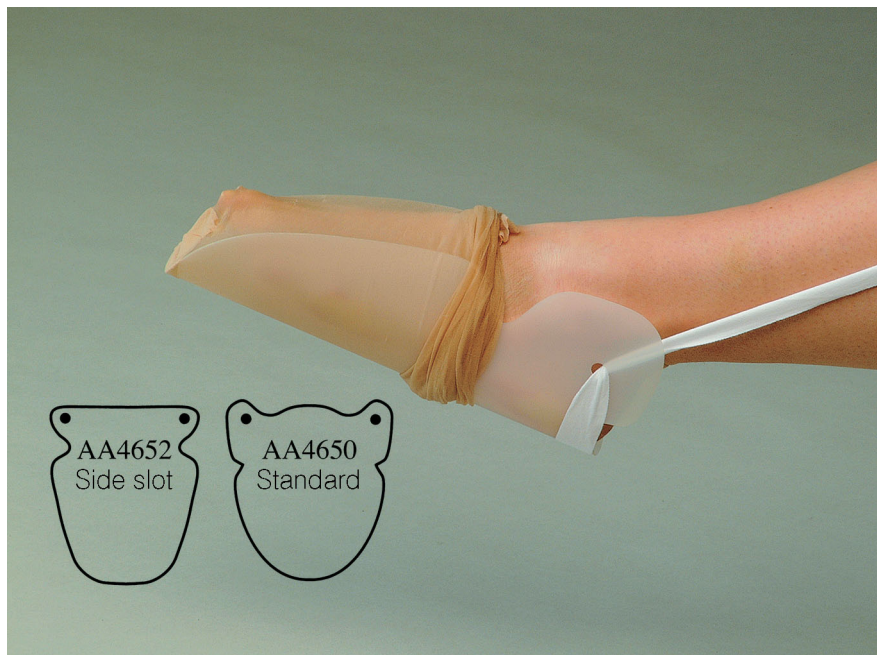

Användaranvisning

AA4652/091095454 Strumppådragare kan användas till strumpor och sockor.

Sitt på ett fast underlag och sätt fötterna på golvet. Sätt strumpan över strumppådragaren. Dra den fram till fördjupningen på strumppådragaren. För in foten och dra strumpan på plats med bomullsbandet som finns på strumppådragarens övre del. För att det ska gå lättare kan man talka benet. Strumppådragaren kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Bomullsbandet kan tvättas i maskin.