

Nyckelgrepp för 2 nycklar



Bruksanvisning

AA6242 är ett nyckelgrepp i plast där Du kan sätta 2 vanliga nycklar och sedan vika in dem i handtaget. Nyckelvredet kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel.

För att sätta nycklar på plats lossar Du det stora handtaget på sidan och tar ut skruven. Lägg nu in Dina nycklar med hälet i nyckelns övre del mot nyckelgreppets övre del. Sätt tillbaka skruven i nyckelgreppet och fäst med det stora handtaget. När Du inte använder nycklarna kan Du vrida in dem på insidan av nyckelgreppet. Hur hårt Du behöver vrida för att få fram nycklarna ur nyckelgreppet bestämmer Du genom att dra det stora handtaget så hårt eller löst som Du själv önskar.