

GLIDBRÄDA I TRÄ MED BÄRHANDTAG



Bruksanvisning

AA8814 är en glidbräda i trä i traditionell design. Den har ett bärhandtag i varje kortända. Placera glidbrädan på underlaget med den raka sidan mot underlaget. Glidbrädan lutar svagt nedåt i varje kortända. Detta underlättar för brukaren att ta sig på glidbrädan. Placera glidbrädan i lämpligt läge och tillse att allt ligger stadigt. Nu kan överflyttningen göras.

Glidbrädans ytbehandling gör att överflyttningen går lättare om man har kläder på. Om man är naken kan man lägga en handduk på glidbrädan och sedan förflytta sig. Glidbrädan kan göras ren med vanliga rengöringsmedel.

Glidbrädan i trä med bärhandtag är 76 cm lång och 21 cm bred.
Den väger 1,4 kg. Max brukarvikt 190 kg.