


Easywipe toatorkare

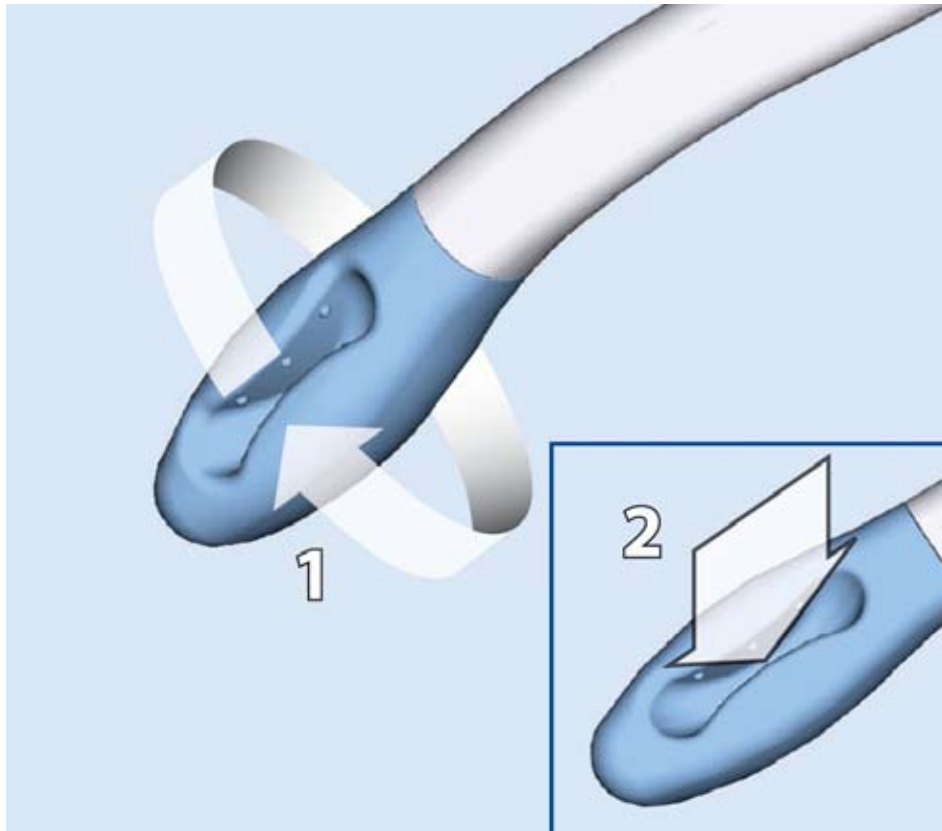

Användaranvisning

091081926 Easywipe toatorkare kan användas med toapapper och våtservetter. Den är enbart avsedd för utvändigt bruk. Easywipe är 37,5 cm lång. Den levereras med bärväska.

Easywipe har ett mjukt rundat fäste i den främre delen. Detta är tillverkat av silikon. I denna del fästes pappret eller våtservetten. Rulla pappret eller våtservetten runt Easywipes mjuka fäste och torka. Easywipe fungerar bäst om den används framifrån.

I den övre delen sitter funktionen som styr Easywipe. Tryck den övre delen mot Easywipe. Nu öppnas fästet i den främre delen, så att brukaren kan fästa eller ta bort papper eller våtservett.

Easywipe bör rengöras med tvål och vatten.