



Duschstol för hörn



Användaranvisning

091325463 Duschstol för hörn är lätt att montera. Lägg sätet med undersidan uppåt på ett bord. Sätt benen i fästena på ramen. Skruva fast. Använd gärna den sexkantnyckel som finns i förpackningen.

Höjden ställs in genom att låssprinten trycks ut. Ställ in önskad höjd och sätt tillbaka låssprinten. Duschstolen kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel. Max brukarvikt 160 kg.

Höjden är ställbar 44cm - 54cm. Sittbredd 52,5cm. Sittdjup 38cm. På golvet är duschstolen 62cm x 52cm x 52cm. Den väger 3,2kg.