

# Sherwood Toa/Duschstol



## Användaranvisning

091422963 Sherwood toa/duschstol för tunga brukare har mjukt säte och ryggstöd. Handtagen fästes med tryckknapp i sidodelen. Armstöden kan tas av för att underlätta sidoförflyttning. Toaöppningen sätts på plats i ramen. På undersidan finns fyra fästen. Sätt dessa i ramen. Den mjuka dynan läggs på plats i sätet om man så önskar. Pottan sätts på plats i de fästen som finns på toaöppningen. Den ställbara höjden ställs in med dom clips som sitter på benen. Toa/dushstolen kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Max brukarvikt 254 kg.

Mått: Ställbar höjd 48cm - 63,5cm  
Armstöden är 22cm höga

Sittbredd 66cm      Sittdjup 50cm  
Toaöppning 28cm x 23cm