

Easyrail uppresningsstöd för enkelsäng o dubbelsäng



Användaranvisning

AA3473 Easyrail för enkelsäng monteras genom att bottendelen på uppresningsstödet placeras på sängbotten. Var noga med att dom korta rören under handtagsfästet ligger mot sängramens långsida. Sätt handtagsbågen på plats och fäst låsclipsen i handtagsbågen.

AA3474 Easyrail för dubbelsäng monteras på samma sätt som ovan. I detta utförande kan bottendelens bredd anpassas genom att ramen är ställbar.

Easyrail kan användas i alla typer av sängar och rengöras med vanliga rengöringsmedel.

AA3473	Längd 67 cm	Bredd 44,5 cm	Max brukarvikt 127 kg
AA3474	Längd 97 - 157,5 cm	Bredd 44,5 cm	Max brukarvikt 127 kg