

## HEEL GUIDE Strumppådragare



---

### Bruksanvisning

AA4665 Heel Guide är lätt att använda. Dom långa sidohandtagen gör att brukaren inte behöver böja och sträcka på benet så mycket för att ta på strumpan. Brukaren väljer hur långt man vill böja sig genom något av dom tre handtag som sitter på sidorna.

Sätt strumpan, med avigsidan ut, i fästet i mitten på Heel Guide. Sätt i foten och dra strumpan på plats. När strumpan sitter på för strumppådragaren rakt bakåt för att flytta den.

Strumppådragaren kan användas även för kompretnsstrumpor. Den är lätt att ta med på resor. Den kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.