


## Bruksanvisning för exakt måtttagning för Juzo® kompressionsärm

### Vänligen observera:

- Arm och hand måste vara ödemfria.
- Bäst är att ta måtten direkt efter lymfdränage.
- Använd ett Juzo® måttband och en hudmarkeringspenna.
- Markera först mätpunkterna med hudmarkeringspennan.
- Längdmåttet ska tas på armens insida. Överför måttet direkt till måttbladets punktade linjer.
- Mät omfången med det bifogade måttbandet. Armen ska hänga löst och inte vara sträckt vid mätningen.
- "cC" mäts distalt från handledsknogen vid handroten för att förhindra att kompressionsärmen glider tillbaka.
- Vid utförandet "infästning på behåns axelband" rekommenderar vi ett brett axelband, var vänlig ange bredden.
- Vid utförandet "med förlängd skulderdel" är denna i riktning mot skuldran 3 till 5 cm lång, beroende på omfånget "cG".
- Kompressionsärm och kompressionshandskar tillverkas och används separat.  
Fördel: Det är lättare att ta på kompressionsärm och handske.  
Dessutom förhindras för högt tryck i fingervecken. (Problemet "överlappningsområde" löses sticktekniskt.)
- Vid utförande med boleroförbindelse förbinds och fästes två kompressionsärmar genom en boleroryggdel.  
Därvid uppstår ingen kompression i skulder- och ryggområdet!

Använd det separata måttblocket för beställning av kompressionshandskar.

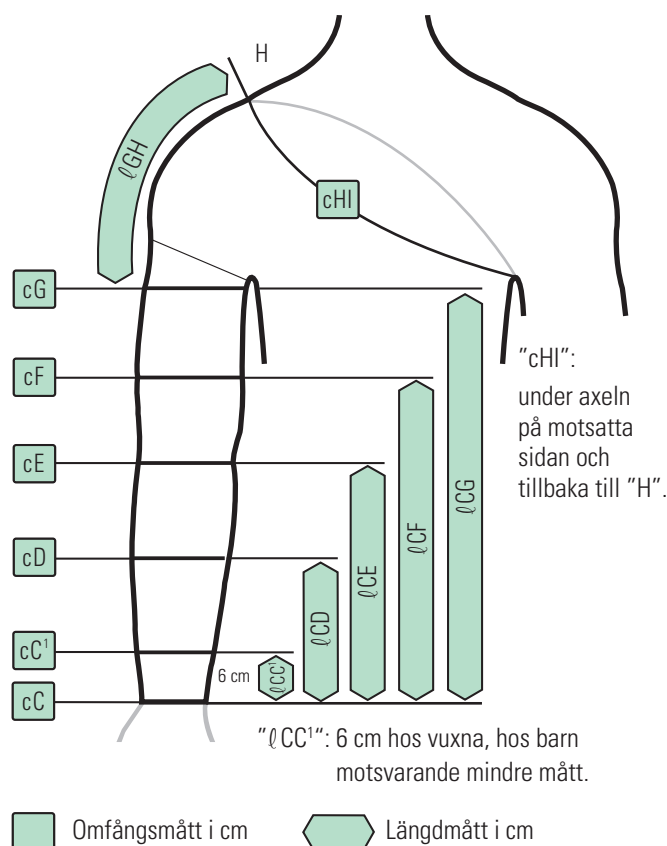

En utförlig mäthanvisning står även i informationsbladet "Måtttagning för kompressionsärmar och kompressionshandskar".

För val av lämplig försörjning, se även katalog Juzo® Expert Specialutförande.

För ytterligare information om ortoser-se Juzo® Ortoskatalog.