

Bruksanvisning för exakt måttagning för Juzo® kompressionshandskar

Vänligen observera:

- Handen bör vara ödemfri resp dränerad.
- Använd ett Juzo® måttband, Tyvek® fingermåttband, fingerlinjal och en hudmarkeringspenna (t ex kajalpenna).
- Marker först alla mätpunkter i **handflatan** med hudmarkeringspennan.
- Särskilt vid fingrarnas små omfångsmått är noggrann mätning förutsättning för god passform. Ange måtten exakt i **millimeter**.
- Vid starkt ödemiserad underarm rekommenderas en förlängd handske (A-E) med sned avslutning.

Längdmått (skriv in de direkt på pillinjerna)

lAB = Längdmått från lillfingrets grundled till mellanhanden, uppmätt på handfatan

lAC = Längdmått från lillfingrets grundled till handleden

lCC' = Längdmått från handleden till underarmen – hos vuxna 6 cm, hos barn motsvarande mindre mått

lCD = Om längre avslutning än "C'" önskas

lCE = Vid behov, t ex vid starkt ödemiserad underarm, slutar ca 2 cm under armbågsvecket

- Vi rekommenderar att inte låta fingeransatserna sluta i ett fingerveck.
- Fingeransatserna bör var minst 2 cm långa för att inte glida tillbaka.
- Mät fingerlängden från "cX" till fingerspetsen eller till önskad avslutning i fingrarnas mellanrum med fingerlinjalen och skriv direkt in måtten på motsvarande pillinje.

– **Ringfingrets längd ska mätas mellan lång- och ringfingret.**

Omfångsmått

cA = Omfång sammanlagt lillfinger - pekfinger, mätt rakt vid lillfingrets grundled

cB = Mätt rakt omkring mellanhanden i höjd med tumvecket

cC = Handledens omfång

cC' = Underarmen, 6 cm proximalt från handleden

cD = Proximalt underarmsomfång, om nödvändigt

cE = Ca 2 cm under armbågsvecket, om nödvändigt

cX = Respektive fingeromfång, uppmätt vid fingervecket


cZ = Fingeromfång, uppmätt vid fingeransatsens önskade ände; vid slutna fingrar vid nagelroten

Om ett handryggsödem uppstår trots att kompressionshandsken sitter optimalt, rekommenderar vi att en tryckpelott läggs in.

 = Omfångsmått i cm

 = Längdmått i cm

OBS:
cX-för tummens omfång mäts ovanför tummensgrundled!

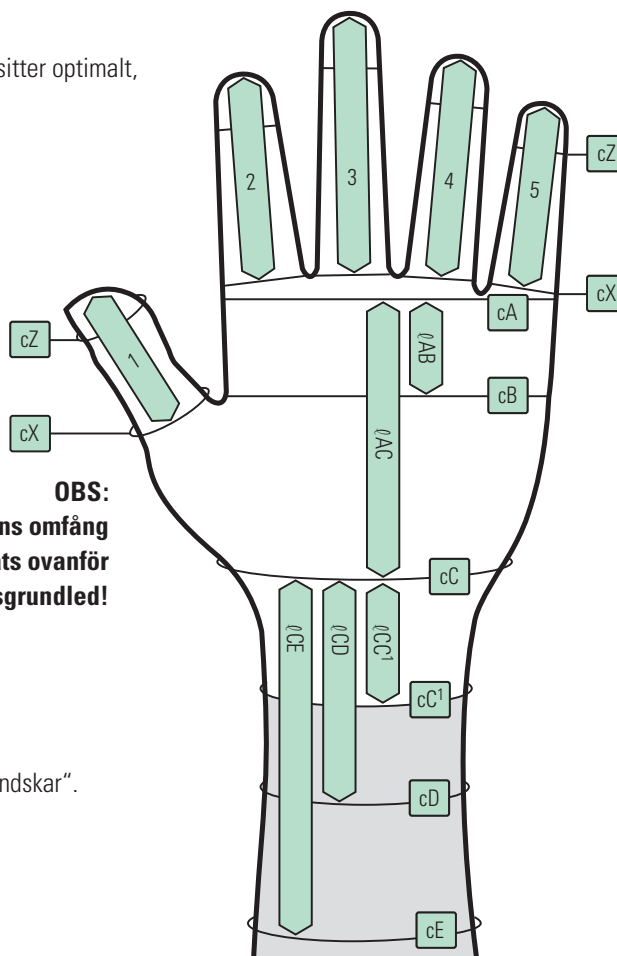

Närmare information framgår av informationsbladet "Tips för måttagning för kompressionsärmor och kompressionshandskar".

För val av lämplig försörjning, se även katalog Juzo® Expert Specialutförande.