



Sänggrind för två sidor AA3420



Sänggrinden passar sängar som är 84-137 cm breda
Längden är ställbar 127-187 cm
Grindhöjd över madrass är ställbar 37-59 cm



Montering och inställningar

1. Sätt de A markerade rören i de F formade rören.
Nu bildas en ram. Var noga med att tryckknappen K pekar utåt. Sätt i clips J med bågen på clipsen utåt.
2. I den övre delen av A röret sätts B delen. Sätt sidodelarna C i B-delarna.
Sätt i clips. Nu bildas den övre delen av sänggrinden.
3. Sätt de långa rören E på sänggrindens nedre del i höjningsdelen F. Sätt i clips i ändarna.
Se figur 1 om sängen är bred och figur 2 om sängen är smal.
T-röret F är räfflat där rör E ska fästas. För E-röret förbi hålen och dra tillbaka, Sätt i clips J. Välj längd så att det finns plats för sänggrinden att löpa fritt bredvid sängbotten. Se figur 3.
4. Ta bort madrassen och lägg sänggramen på sängbotten. Ställ in önskad längd på benen genom att lossa clipsen J. Ställ in längden och lås med clipsen.
5. Ställ sänggrindarna längs sängens långsidor och lyft i sänggrinden i ställningen.
Tryck på knappen K när sänggrinden ska sänkas.

För att höja sänggrinden lyft den uppåt. Ett "klick" hörs när det är låst.

Sänggrinden kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

