

## Savanah toaförhöjning

Art.nr : AA2112 och AA2114Y



### Användaranvisning



Savanah toaförhöjning kan monteras på alla toaletter. Monteringen görs utan verktyg.

Lägg toaförhöjningen med undersidan upp på ett fast underlag. Öppna påsen med fästen. Skruva på fästena på toaförhöjningen. Se bild A.

Vänd toaförhöjningen rättvänt och sätt den på toalettskålen med den smalare utskärningen framåt och fästena bakåt. När den främre läppen möter toalettstolen skruvas den fast. Se bild B.

Det invändiga måtten är: Bredd 22 cm och längd 36 cm.

Savanah finns i två höjder: AA2112 5cm och AA2114Y 10cm  
Max brukarvikt 190kg.



Savanah toaförhöjning kan rengöras med alla vanliga rengöringsmedel.

