


Uribag, urinflaska för kvinnor

Art.nr : 091159615




Användaranvisning

1. Dra upp locket.

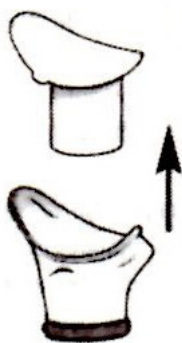

2. Dra ner påsen.

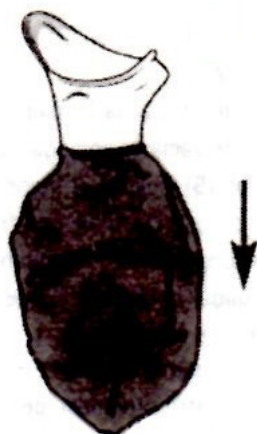


3. Använd urinflaskan, töm flaskan och rengör med mildt rengöringsmedel (Påsen går att dra ut genom den övre öppningen för att lufttorka.)



4. Dra ner påsen, vik den lodrätt och sedan vågrätt.



5. Tryck upp påsen i behållaren.

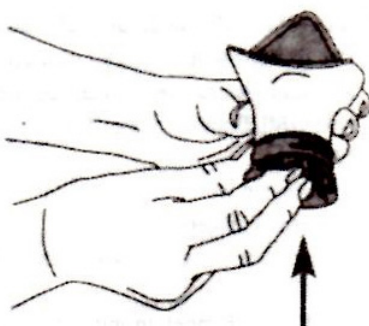

6. Sätt på locket, (påsen kommer att åka ut en bit men håller sig kvar ihopvikt.)

