

HARROGATE DUSCHSTOLAR



Bruksanvisning

Ramen i duschstolarna är av stålrör som är överdragna med plast. Sätet är i plast. Alla modeller tar liten plats. Du gör ren duschstolen med en fuktig trasa. Man kan använda alla vanliga rengöringsmedel. Harrogate kan även decificeras. Max brukarvikt 165 kg

Montera sitsen på ramen genom att trycka fast sitsen på dom fästen som sitter på ramen. Modell AA1640 och AA1645 har ställbar höjd. Man ställer in höjden genom att lossa den lilla ringen på stödbenet. Välj önskad höjd. Sätt ringen på plats genom att trycka fast den över hålet.

AA1620	Sitthöjd	51 cm	Sittbredd	56 cm	
AA1630	Sitthöjd	48 - 66 cm	Sittbredd	56 cm	
AA1640	Sitthöjd	51 cm	Sittbredd	56 cm	4 hjul/broms
AA1645	Sitthöjd	48 - 66 cm	Sittbredd	56 cm	4 hjul/broms